

取扱説明書

サンキューポイントマットレス/防水タイプ

PD501-TU8909


この度は、サンキューポイントマットレス/防水タイプPD501-TU8909をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

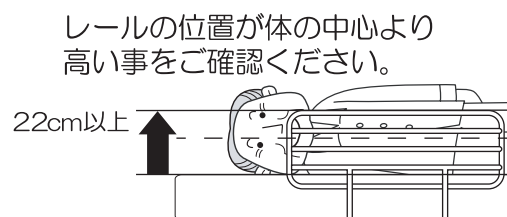

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

特徴

- 体圧分散・背圧軽減に優れたマットレスです。
- ムレにくい清拭タイプの透湿防水カバーを採用しています。
- 外カバーのファスナーは裏面、さらにマットレスの端から内側に取り付ける事により、失禁や水こぼし等での浸み込みを防ぎます。
- 外カバーの裏面はカビが発生しにくいように、通気性の良いポリエステル生地を採用しています。

使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- ロゴが脚側（フットボード側）に来るようにマットレスを敷いてお使いください。
- ロゴがある方が表面です。裏返して使用しないでください。


お手入れ

マットレス中身のお手入れ

- マットレスを清潔にご使用いただくために（カバーから中身を出して行ってください）
 - ・定期的に通気や換気を行ってください。
 - ・定期的に日陰干しを行ってください。
 - ・定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。
- ※日陰干し⇒掃除機でのマット全面の吸引⇒日陰干しを行っていただくと、より効果的です。
- 中身は3層構造になっていますので、汚れた場合、それぞれをご家庭のシャワーなどで洗浄してください。
日陰で干し、完全に乾いた後にカバーに入れてください。

外カバーの洗濯時の注意

- ドライクリーニング・乾燥機は表面のポリウレタンラミネートを傷めますので絶対に使用しないでください。
- タンブラーでの乾燥はポリウレタンラミネートが剥がれたり、破れたりする恐れがありますので絶対に避けてください。
- アイロンは絶対に避けてください。
- 洗濯機による洗濯は絶対に避けてください。
防水性が高いため水が抜けず、洗濯機転倒等の危険性があります。

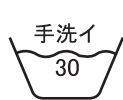

洗濯機は使用できません



塩素漂白剤での漂白はできません



アイロン掛けはできません



ドライクリーニングはできません



絞らないでください



日陰でつり干ししてください

仕様

商品名	サンキューポイントマットレス/防水タイプ
型式	PD501-TU8909
寸法 長さ×幅×厚さ	長さ192.0cm×幅89.0cm×厚さ9.0cm
重さ	8.5kg
材料	ウレタンフォーム、ポリエステル
外装生地組成	外カバー：ポリウレタンラミネート、ポリエステル 内カバー：ポリエステル
原産国	日本

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2丁目8-39

製品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



0120-77-3433

フリーアクセス
携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

12.07月作成

TS120701