

# 取扱説明書

セーフティーネット

PASN-TU79


この度は、セーフティーネットPASN-TU79をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。


## 特徴

- 上部（握り部）には、内側に滑りにくい加工処理を施しています。
- ベッド内側からの可視性が高いメッシュ加工、色も茶色で木目にマッチします。
- サイドレールにしっかりフィットしたダブツキが少ない安全設計です。




## ■ サイドレール PA501-TU79

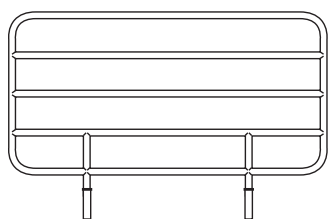


## ■ セーフティーネット各部の名称

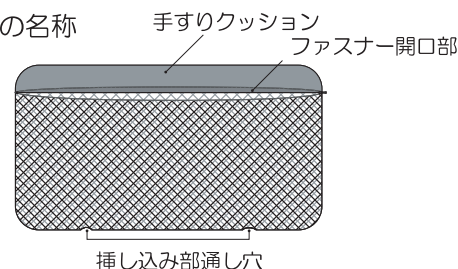

## ■ 装着手順

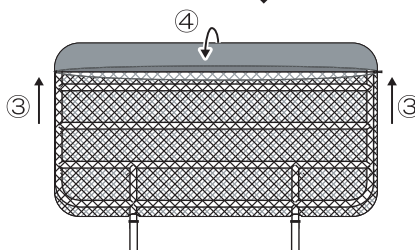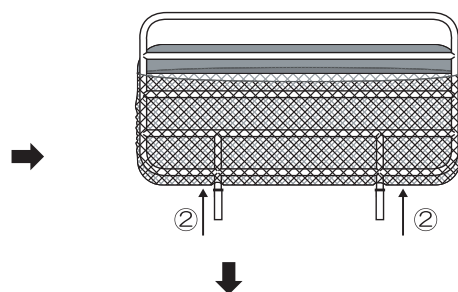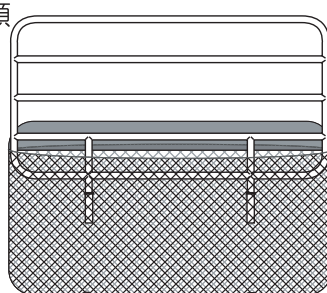

※サイドレールとセーフティーネットの角を合わせて、縫い目を最上部に合わせてファスナーを閉じます。

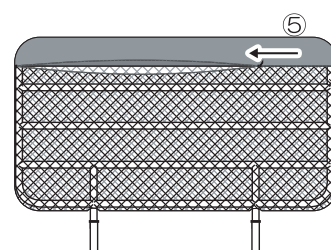

## 仕様

商品名	セーフティーネット
型式	PASN-TU79 (適合機種: PA501-TU79)
長さ×幅 (厚さ)	430mm×790mm (厚さ 上部握り部: 9.5mm/メッシュ部:0.9mm)
材料	本体: ポリエステル 上部握り部: ポリエステル/ポリウレタン/合成ゴム
原産国	日本

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目8-39

製品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡下さい



フリーアクセス  
携帯・PHS・OK

**0120-77-3433**

《平日 午前9時～午後5時30分》  
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

'12.12月作成

TS121223