








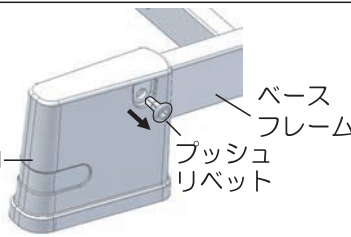
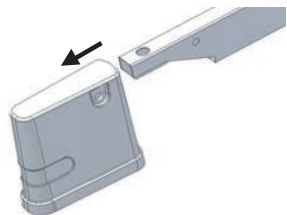
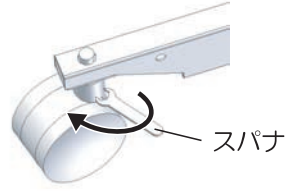


この度は、Miolet フォーユー キャスターセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。不足部品が無いが、梱包内容をお確かめください。

### ●梱包内容

 <p>キャスター ストッパー付き：2個</p>	 <p>キャスター ストッパー無し：2個</p>	 <p>キャップ：4個</p>	 <p>プッシュリベット：4個</p>
 <p>スパナ：1本</p>	 <p>保証書：1枚</p>	 <p>本書：1枚</p>	

### ●ベースフレームへのキャップとキャスターの取り付け方

※必ず、ベースフレームのみの状態で取り付けをおこなってください。ストッパー付きキャスターとストッパー無しキャスターは、ベースフレームにそれぞれ対角側に取り付けてください。

<p>①</p>  <p>固定脚 ベースフレーム プッシュリベット</p> <p>固定脚の外側のプッシュリベットを抜いてください。</p>	<p>②</p>  <p>固定脚をベースフレームから外してください。</p>	<p>③</p>  <p>付属のスパナでベースフレームの穴に、キャスターを取り付けてください。</p>
<p>④</p>  <p>キャップ</p> <p>キャップを横からはめて、キャップの穴に外側からプッシュリベットを挿してベースフレームに取り付けてください。</p>	<p>⑤</p>  <p>同様に、4箇所に取り付けてください。</p>	

### ⚠ 警告

キャップとキャスターを取り付けの際は、ベッドを組み立てた状態でおこなわないでください。また、ベースフレームを立てて取り付ける場合はベースフレームが倒れないように注意してください。

ストッパー付きのキャスターが対角線になるように取り付けてください。

キャスターの取り付け完了後、ベースフレームを正常な状態に戻しキャスターをロックしてください。

ベッドを移動するとき以外は、ストッパーを踏み込んでロックしてください。

キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検してください。

### ○点検 / お手入れ

- ・キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検をしてください。
- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- ・製品に水を散らしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、ご使用しないでください。

— 商品に関するお問い合わせは下記へ —

**フリーアクセス** **0120-77-3433**  
携帯・PHS-OK  
 《平日 午前9時～午後5時30分》  
 《土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く》

株式会社 **プラッツ**  
 〒816-0921  
 福岡県大野城市仲畑2丁目8-39