

取扱説明書

サンキューポイントマットレス 83cm幅

PD505-A8309
PD505-A8309S


この度は、サンキューポイントマットレス 83cm幅 PD505-A8309・PD505-A8309Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

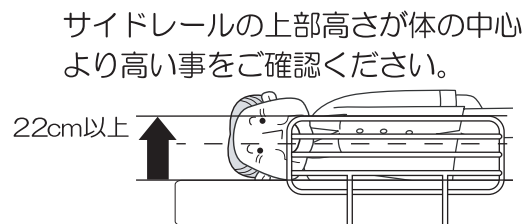

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

特徴

- 体圧分散・背圧軽減・通気性・通水性に優れたマットレスです。
- 端座位がとりやすく、ギャッチ性にも優れています。
- 外カバーは表面に撥水処理、裏面に難燃処理に加え、抗菌・防臭処理をしています。
- 外カバーは取り外しができ、洗濯が可能です。

使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- マットレスの上にはベッドパッドやシーツを敷いてお使いください。
- ロゴが脚側（フットボード側）に来るようにマットレスを敷いてお使いください。
- ロゴがある方が表面です。裏返して使用しないでください。

お手入れ

● マットレスを清潔にご使用いただくために

- ・ 定期的に通気や換気を行ってください。
- ・ 定期的に日陰干しを行ってください。
- ・ 定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。

※日陰干し⇒掃除機でのマット全面の吸引⇒日陰干しを行っていただくと、より効果的です。

● 外カバーは家庭用洗濯機で洗濯可能です。

● 外カバーの洗濯時の注意（マットタグの説明）



液温は40°Cまでで、洗濯機の弱水流による洗濯ができます。



塩素漂白剤での漂白はできません。



アイロンは使わないでください。



ドライクリーニングには対応していません。



2分以下の短時間で絞ってください。

● 中身は3層構造になっていますので、汚れた場合、それぞれをご家庭のシャワーなどで洗浄してください。

日陰で干し、乾いた後にカバーに入れてください。

仕様

商品名	サンキューポイントマットレス 83cm幅
型 式	(レギュラータイプ) PD505-A8309 (ショートタイプ) PD505-A8309S
寸 法 幅×長さ×高さ	PD505-A8309：幅83.0×長さ192.0×高さ9.0cm PD505-A8309S：幅83.0×長さ182.0×高さ9.0cm
重 さ	PD505-A8309：7.9kg PD505-A8309S：7.5kg
材 料	ウレタンフォーム、ポリエステル
外装生地 of 組成	外カバー・内カバー：ポリエステル
原産国	日本

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目8-39

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



0120-77-3433

フリーアクセス
携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

15.01月作成

NP0043