



梱包内容と各部名称

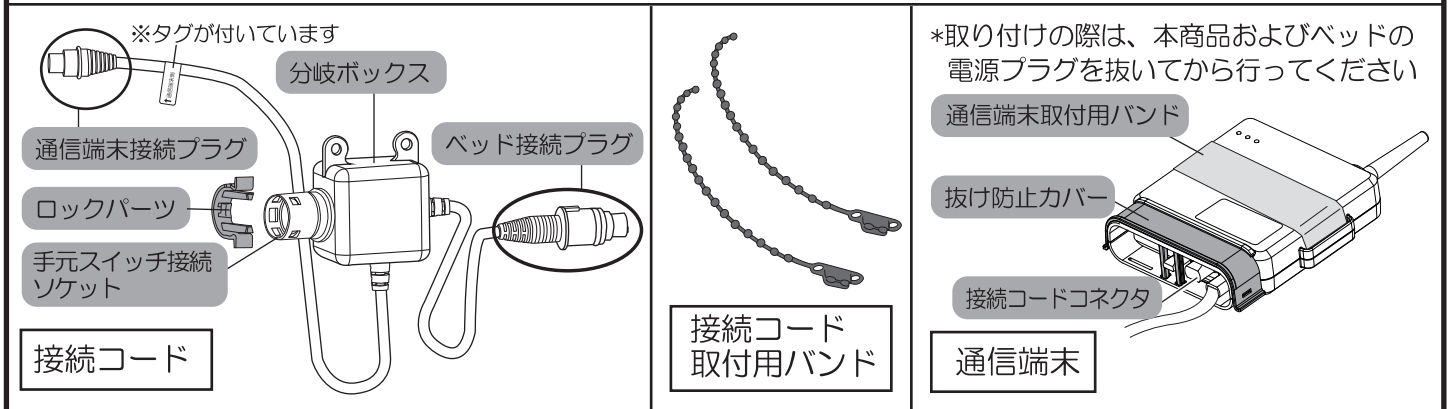


取り付けの準備

- ①ご利用者様はベッドから降りていただき、マットレスを降ろします
  - ②P100の取扱説明書を確認してボトムを全て取り外してください
  - ③ベッドを一番上の高さまで上げます
  - ④ベッドの電源プラグを抜きます
- ※P100の取扱説明書は弊社のホームページからダウンロード出来ます

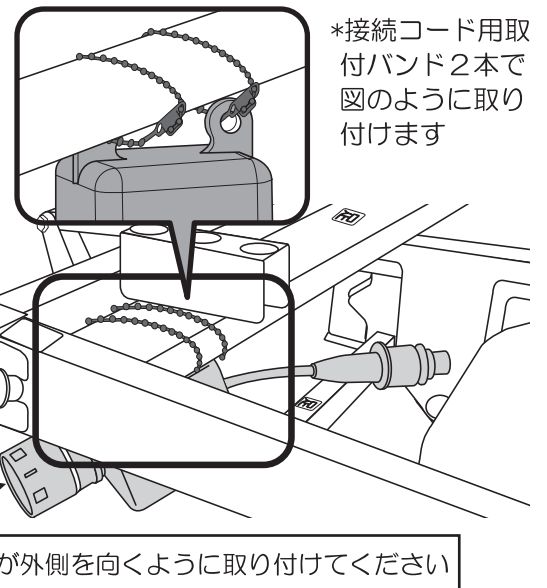


- 1** 下図位置に **分岐ボックス** の穴 2 箇所「**接続コード取付用バンド**」を通して取り付けます。

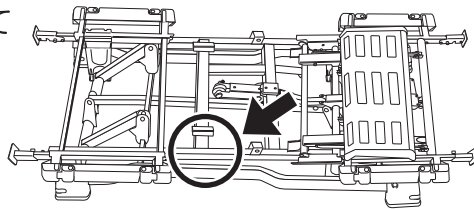


- 2** コントロールボックスのケーブルロックを外し、"手元スイッチ"コードを抜きます。手元スイッチコードを抜いた差し込み口に接続コードの **ベッド接続プラグ** を差し込み、ケーブルロックを再度取り付けてください。

- 2-1** ケーブルロックを外します

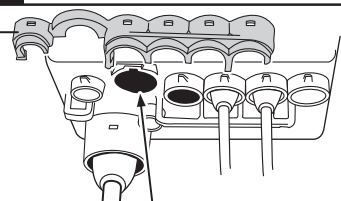

- 2-2** 手元スイッチコードを抜きます

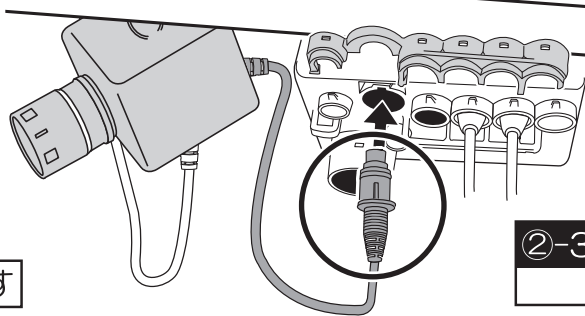

- 2-4** ケーブルロックを取り付けてください



\*軽くコードを引っ張り抜けないことを確認してください

- 2-3** ベッド接続プラグを奥までしっかり差し込みます


- 3** 接続コードの **手元スイッチ接続ソケット** にコントロールボックスから抜いた "手元スイッチ"コードを差し込み、**ロックパーツ** を取り付けます。

- 3-2** ロックパーツを取り付けます

\*軽くコードを引っ張り抜けないことを確認してください

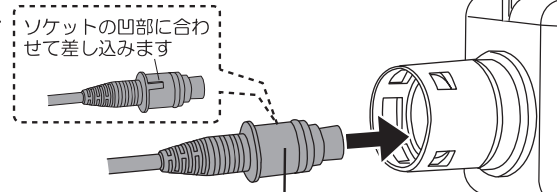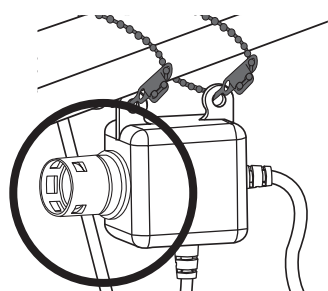


- 3-1** 手元スイッチコードをしっかりと奥まで差し込みます

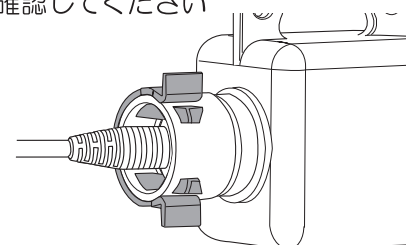

最初に取り外したボトムを、P100の取扱説明書を確認して取り付けてください


- 4** 通信端末の **抜け防止カバー** を外し、**接続コードコネクタ用キャップ** を取り外します。  
通信端末の **接続コードコネクタ** に接続コードの **通信端末接続プラグ** を差し込み、**通抜け防止カバー** を取り付けます。

**④-1** 抜け防止カバーを外します **④-3** 通信端末プラグを差し込みます

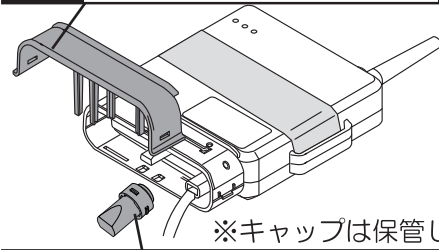

※キャップは保管してください。


**④-2** 接続コードコネクタ用キャップを外します

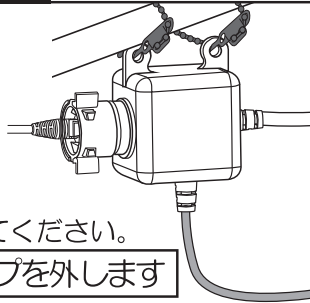


**④-4** 抜け防止カバーを取り付けます

\*軽くコードを引っ張り抜けないことを確認してください

- 5** 「通信端末」のコードをベッドのコードクリップに取り付けてください。

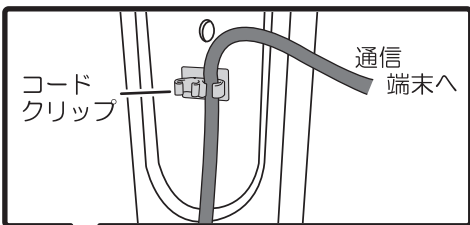


通信端末へ

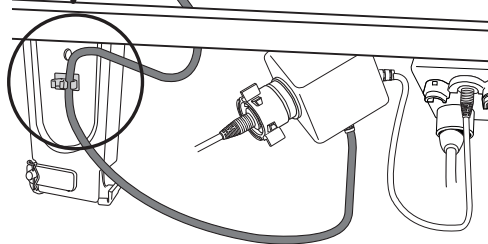

※コードの取り回しに問題が無いか確認してください。

- 6** ひざ脚ボトムネットに **通信端末取付用バンド** を巻きつけるようにして、ネットの裏側に「通信端末」を取り付けます。

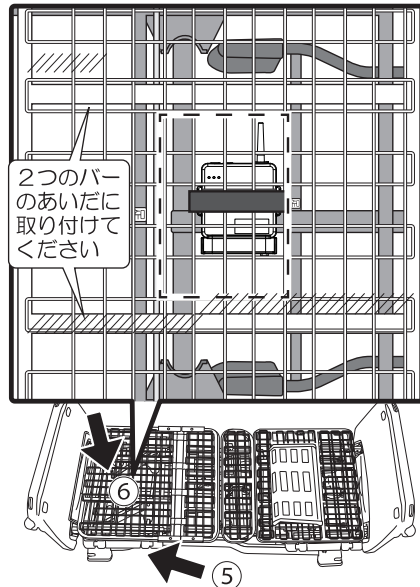


バンドを巻きつけるように取り付けてください



「足」のバーから通信端末の端が5 cmから15センチになるよう取り付けてください

5 cmから 15 cm

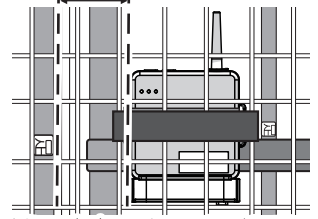


ぐらつかないようにバンドでしっかり固定してください

**注意**

ベッド操作時にコードが駆動部に巻き込まれないように注意して接続し、配線を行ってください。

※①から③の機器が下図のように接続されているか確認してください

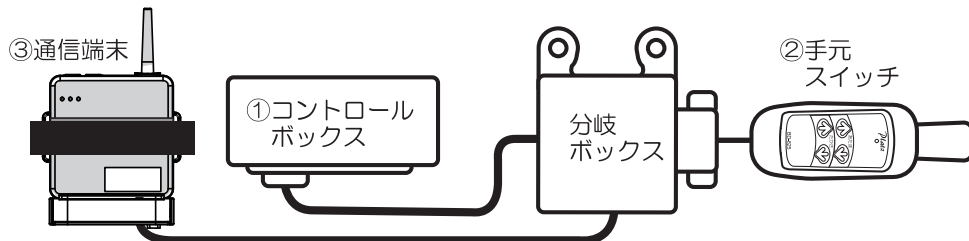

PW01-BDシリーズ(見守り通信サービス「ベッドde見守り隊」通信端末セット)の取扱説明書を参照して動作確認を行ってください

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目8-39

商品についてのお問合せは下記までご連絡ください

**092-576-9229**

《平日 午前9時～午後5時30分》

(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

16.1月作成

NP0078-Z