

取扱説明書

ポケットコイルマットレス

PM03-9618-4/4


この度は、ポケットコイルマットレスPM03-9618-4/4をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- この商品は改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ、怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。

サイドレールの上部高さが体の中心より高い事をご確認ください。

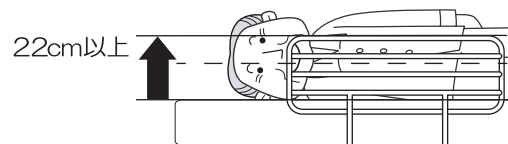

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・中身やカバーが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

特徴

- 4つの臭気に効く新消臭素材「キュートリー」を使用。アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナールの4つの臭気に効果を発揮します。
- へたりにくく、耐久性に優れています。
- ポケットコイルの配列を横配列にすることでリクライニングへの追従性が大幅に改善されます。

使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- マットレスの上にはベッドパッドやシーツを敷いてお使いください。
- 定期的に頭足方向を変えることで、長持ちさせることができます。

お手入れ

●マットレスを清潔にご使用いただくために

- ・定期的に通気や換気をしてください。
- ・定期的に日陰干しを行ってください。
- ・定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。

※日陰干し⇒掃除機でのマット全面の吸引⇒日陰干しを行っていただくと、より効果的です。

仕様

商品名	ポケットコイルマットレス
型 式	PM03-9618-4/4
寸 法 幅×長さ×厚さ	幅96.0×長さ196.0×厚さ18.0cm (幅960×長さ1960×厚さ180mm)
質量	20.0kg
コイルスプリング形状	ちょうちん形ばね 線材直径1.90mm
コイルスプリング数	480
コイルスプリング材料の種類	SWRH72B・硬鋼線C種 相当
詰物の材料	消臭綿(キュートリー)・ポリエステル・ウレタンフォーム
外装生地組成	ポリエステル100%
原産国	中国

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



フリーアクセス
携帯・PHS・OK

0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

16.2月作成

NP0075-A