

取扱説明書

ニーパロⅡ専用 安心ひざパッド
「ニーパロ・パッドⅡ」

PF500P-116


この度は、ニーパロ・パッドⅡPF500P-116をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。


特徴 ●安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」は、ベッドと車いすやポータブルトイレ間との移乗を、より「安全・安心」「スムーズ」に行うことができるベッド用グリップ「ニーパロⅡ」の専用オプションです。

ご注意 「ニーパロ・パッドⅡ」は消耗品です。

■ 自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロⅡ」 PF500-116

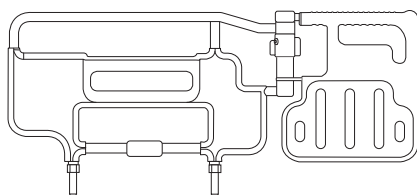


■ 安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」PF500P-116

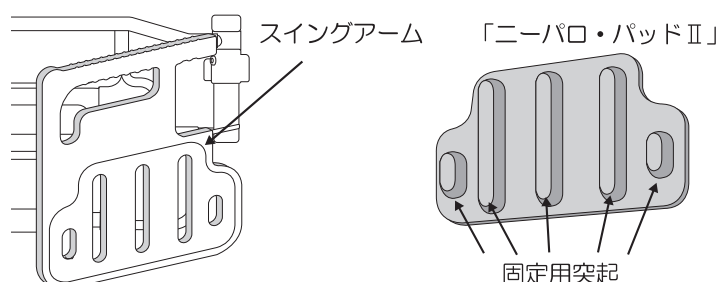


スイングアームの5つの穴に安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」の固定用突起を入れ固定してください

■ 安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」使用例

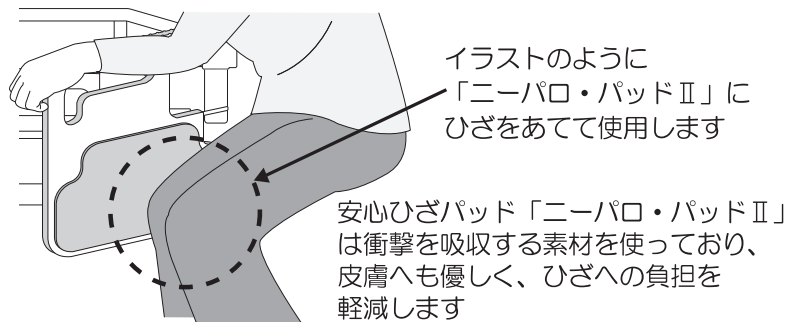

■ 安心ひざパッド装着時

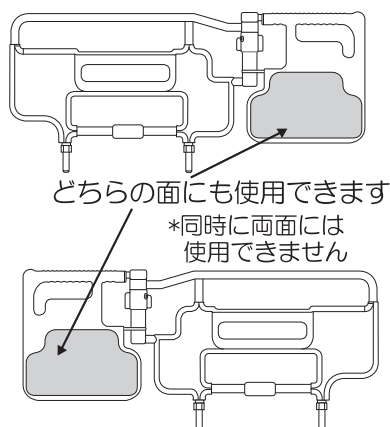

どちらの面にも使用できます

*同時に両面には
使用できません

イラストのように
「ニーパロ・パッドⅡ」に
ひざをあてて使用します

安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」
は衝撃を吸収する素材を使っており、
皮膚へも優しく、ひざへの負担を
軽減します

仕様

商品名	ニーパロⅡ専用 安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」
型式	PF500P-116 (適合機種：PF500-116専用)
幅×長さ×厚さ	20.0×35.0×3.3cm
材料	EVA
原産国	ベトナム