



取扱説明書

ユービーポイントマットレス

PD503-A9008/PD503-A9008S

PD503-A8308/PD503-A8308S


この度は、ユービーポイントマットレスをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。

警告 この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
 - ・体や腕をはさまれ怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
 - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。
- 火気類にマットレスを近づけ過ぎないでください。
 - ・火災や変色、変形の原因になります。

サイドレールの上部高さが体の中心より高い事をご確認ください。

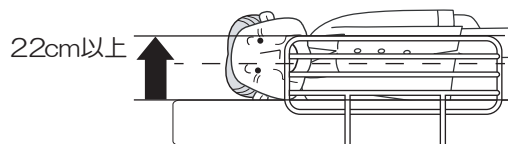

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています


- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
 - ・外カバーやウレタンフォームが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
 - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
 - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
 - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

特徴

- 清拭タイプの防水カバーを採用しています。
- ファスナーは、カバーの着脱のしやすいL字ファスナーを採用しています。
- かたさの異なるリバーシブルタイプで、お好きな寝心地の方をお選びいただけます。

使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- 定期的にウレタンフォームの頭足方向を変えることで、長持ちさせることができます。
- 白のウレタンフォームを上面にすると「かため」で使用できます。
お好きな寝心地をお選びください。

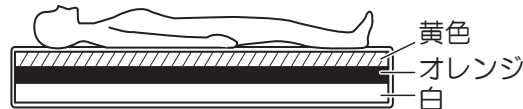

お手入れ

外カバーの洗濯時の注意

- ドライクリーニング・乾燥機は表面のポリウレタンラミネートを傷めますので使用しないでください。
- タンブラーでの乾燥はポリウレタンラミネートが剥がれたり、破れたりする恐れがありますので避けてください。
- アイロンは絶対に避けてください。
- 洗濯機による洗濯は避けてください。

防水性が高いため水が抜けず、洗濯機転倒等の危険性があります。



液温は40℃以下のお湯で、
手洗いができます。
※つけおき洗いは避けて下さい。



漂白処理は
できません。



洗濯処理後のタンブル
乾燥処理はできません。



日陰でのぬれつき干し乾燥が適して
います。※絞らないでください。



アイロンは使わないで
ください。



ドライクリーニングには
対応していません。



弱いウエットクリーニング
処理ができます。

仕様

商品名・型式	ユービーポイントマットレス / 90cm幅 レギュラータイプ: PD503-A9008 / 90cm幅 ショートタイプ: PD503-A9008S / 83cm幅 レギュラータイプ: PD503-A8308 / 83cm幅 ショートタイプ: PD503-A8308S
寸法: 幅×長さ×厚さ (商品質量)	PD503-A9008 : 幅90.0cm×長さ191.0cm×厚さ8.0cm (6.1kg) PD503-A9008S : 幅90.0cm×長さ182.0cm×厚さ8.0cm (5.9kg) PD503-A8308 : 幅83.0cm×長さ191.0cm×厚さ8.0cm (5.7kg) PD503-A8308S : 幅83.0cm×長さ182.0cm×厚さ8.0cm (5.4kg)
構造	平形
硬さ	・ウレタンフォーム〈黄色〉: 92.0ニュートン(ふつう) ・ウレタンフォーム〈オレンジ〉: 125.0ニュートン(かため) ・ウレタンフォーム〈白〉: 125.0ニュートン(かため)
復元率	95.0パーセント
材料	ウレタンフォーム
外装生地組成	外カバー: ポリウレタンラミネート、ポリエステル
原産国	ベトナム

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



0120-77-3433

フリーアクセス
携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

16.11月作成

NPO051-A