



# 取扱説明書

オーバーレイウレタンマットレス/90cm幅 レギュラータイプ

**PM06-9003**

この度は、オーバーレイウレタンマットレス/90cm幅 レギュラータイプ PM06-9003をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 弊社商品のP100シリーズ、もしくはP106シリーズのベッドでお使いください。

## 特徴

- 外カバーの裏面にポケットを作り、ベッドセンサーなどを定位置に固定することができます。
- 外カバー、中材ともに洗濯可能です。

## 使用方法

- 四隅のゴムバンドでマットレスに固定してお使いください。

## お手入れ

- 外カバー ポリエステル 100%



液温は40℃以下のお湯で手洗いができます。



漂白処理はできません。



洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。



日陰でのぬれつり干し乾燥が適しています。※絞らないでください。



アイロンは使わないでください。



ドライクリーニングには対応していません。



ウェットクリーニングには対応していません。

- 中材 ウレタンフォーム

手洗いによる水洗いが可能です。

乾燥の際は形を整えて、日陰に平干ししてください。

## 仕様

商品名	オーバーレイウレタンマットレス/90cm幅 レギュラータイプ
型式	PM06-9003
適合マットレスサイズ 幅×長さ(厚さ)	幅90.0cm×長さ191.0cm(厚さ4.0cm~14.0cm)
外装生地の種類	ポリエステル
中材の種類	ウレタンフォーム
原産国	韓国

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



**0120-77-3433**

フリーアクセス  
携帯・PHS・OK

《平日 午前9時~午後5時30分》  
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

'16.11月作成

NP0098-A