

# 取扱説明書

硬質ウレタンマットレス

PSB-FW14(4/4)

この度は、硬質ウレタンマットレスPSB-FW14(4/4)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。


- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 商品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- この商品は、改良などの理由により取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。



## 警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- サイドレールやベッド用グリップと併用して使われる場合は、ベッドとの隙間に注意してください。
  - ・体や腕をはさまれ、怪我をする恐れがあります。
- マットレスの上に他のマットレスやお布団を敷かないでください。
  - ・相対的に体の位置が高くなり、サイドレールが低くなることでサイドレールを乗り越え、ベッドからの転落の原因になります。
- 火気類にマットレスを近づけ過ぎないでください。
  - ・火災や変色、変形の原因になります。

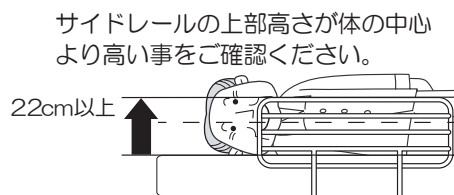

## 注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています

- マットレスを使って人や物を移動させないでください。
  - ・外カバーやウレタンフォームが破損する原因となり、カバーが破けることでマットレスからの転落事故の恐れがあります。
- 指定品以外の組み合わせはしないでください。
  - ・思わぬ隙間ができ、怪我をする恐れがあります。
- 暖房器具は1.5m以上離してください。
  - ・変質や火災の原因にもなります。
- マットレスを無理に折り曲げないでください。
  - ・変形の原因になり、床ずれの原因にもなります。

## 特徴

- 普通のチップウレタンと硬質のチップウレタンの良さを活かしたやや固めのマットレスです。
- 外カバーは洗濯が可能です。カバーは上下別々に洗濯してください。

## 使用方法

- このマットレスはベッドの上に直接敷いてお使いください。
- マットレスの上には、ベッドパッドやシーツを敷いてお使いください。
- 定期的に頭足方向を変えることで、硬化を抑え長持ちさせることができます。

## お手入れ

### ●マットレスを清潔にご使用いただくために

- 定期的に通気や換気をしてください。
- 定期的に日陰干しを行ってください。
- 定期的にマットレス全面に掃除機をかけ、チリやホコリを吸引してください。

### ●外カバーは手洗いで洗濯可能です。

※カバーは上下別々に洗濯してください。

### ●洗濯時の注意（マットタグの説明）



液温は40℃以下のお湯で、手洗いができます。



漂白処理はできません。



洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。



日陰でのぬれつき干し乾燥が適しています。



アイロンは使わないでください。



ドライクリーニングには対応していません。



ウェットクリーニング処理には対応していません。

## 仕様

商品名	硬質ウレタンマットレス
型式	PSB-FW14(4/4)
寸法 幅×長さ×高さ	幅96.0×長さ196.0×高さ14.0cm (幅960×長さ1960×高さ140mm)
質量	15.3kg
材料	ポリエステル、ウレタンフォーム・チップウレタン
外装生地組成	ポリエステル100%
原産国	ベトナム

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

製品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



**0120-77-3433**

フリーアクセス  
携帯・PHS・OK

《平日 午前9時～午後5時30分》  
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

'16.11月作成

NPO152-Z