









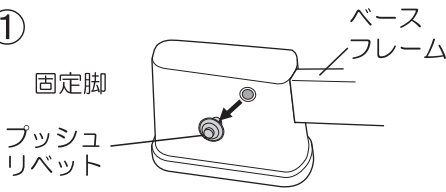
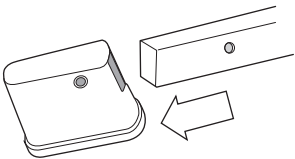
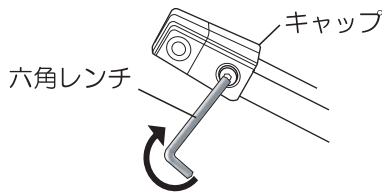
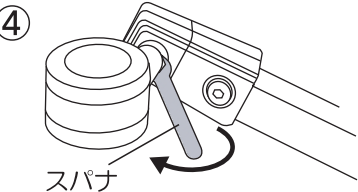
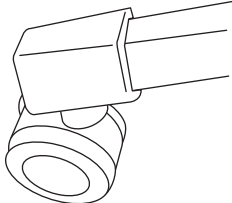
この度は、Miolet II専用キャスターセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。不足部品が無いが、梱包内容をお確かめください。

### ●梱包内容

 キャスター ストッパー付き：2個	 キャスター ストッパー無し：2個	 キャップ：4個	 ネジ：4個
 スパナ：1本	 六角レンチ：1本	 保証書：1枚	 本書：1枚

### ●ベースフレームへのキャップとキャスターの取り付け方

※必ず、ベースフレームのみの状態で取り付けをおこなってください。ストッパー付きキャスターとストッパー無しキャスターは、ベースフレームにそれぞれ対角側に取り付けてください。

<p>①</p>  <p>固定脚 プッシュ リベット</p> <p>ベース フレーム</p> <p>固定脚の外側のプッシュリベットを抜いてください。</p>	<p>②</p>  <p>固定脚をベースフレームから外してください。</p>	<p>③</p>  <p>キャップ 六角レンチ</p> <p>キャップを横からはめて、内側の穴を付属のネジを使用し、六角レンチで締めてください。</p>
<p>④</p>  <p>スパナ</p> <p>付属のスパナでベースフレームの穴に、キャスターを取り付けてください。</p>	<p>⑤</p>  <p>同様に、4箇所に取り付けてください。</p>	

### ⚠ 警告

キャップとキャスターを取り付けの際は、ベッドを組み立てた状態でおこなわないでください。また、ベースフレームを立てて取り付ける場合はベースフレームが倒れないように注意してください。

ストッパー付きのキャスターが対角線になるように取り付けてください。

キャスターの取り付け完了後、ベースフレームを正常な状態に戻しキャスターをロックしてください。

ベッドを移動するとき以外は、ストッパーを踏み込んでロックしてください。

キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検してください。

### ○点検 / お手入れ

- ・キャップ、キャスター、ネジの取り付けが確実かどうか、定期的に必ず点検をしてください。
- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- ・商品に水を散らしたり、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、ご使用しないでください。

— 商品に関するお問合せは下記へ —

**フリーアクセス** **0120-77-3433**  
携帯・PHS・OK  
《平日 午前9時～午後5時30分》  
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921  
福岡県大野城市仲畑2丁目3-17