


取扱説明書

ベッド用グリップ ニーパロ十(プラス)

PG02-116AT

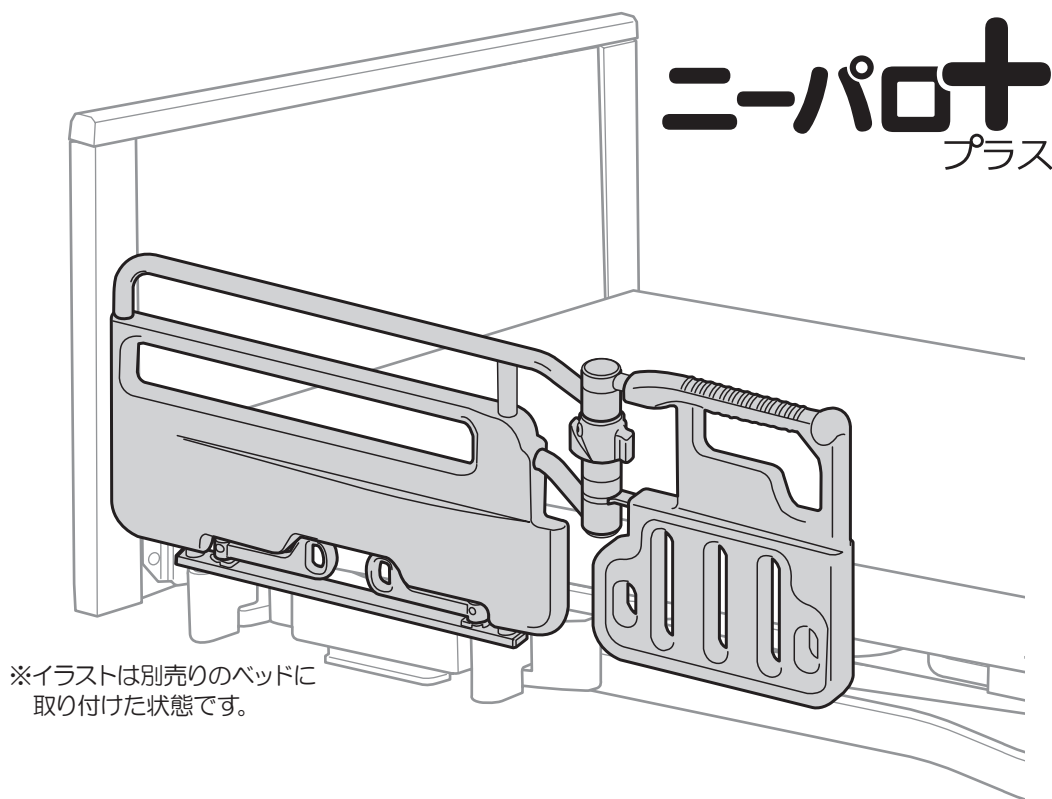

このたびは当商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- 介護が必要な方がご使用になる場合は、介護する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡してください。
- お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

保証書付

目次

目次	ページ
■目次・商品の特長・使用目的	1
■安全にご使用いただくための注意事項	2～3
■各部の名称・付属品の確認・警告ラベルについて	4
■ベッドへの取り付け方法	5
■スイングアームの解除 / ロック方法	6
■使用方法	7
■各種サイドレールとの組み合わせについて	
・適合ベッド・並列で組み合わせ可能なサイドレール.....	8
■商品の仕様・お手入れ・点検	9
■保証とアフターサービス	10

商品の特長


- スイングアーム角度が、片側 0° / 45° / 90° / 135° (45° 刻み) で設定できます。
- 上記の角度でスイングアームが自動的にロックされますので、安全にお使いいただけます。
- スイングアームのロック解除には 2 段階の操作が必要です。
意図しないロック解除を防ぎ、安心してご使用いただけます。
- 取り付けの際に工具は必要ありません。
- 簡単・確実にベッドに固定することができます。


使用目的

- ベッドでの起き上がりや、ベッドからの立ち上がり、移乗を補助することを目的に作られています。

安全にご使用いただくために(必ずお守りください)

この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の人々への危害や財産への阻害を未然に防止する為に、各種の絵表示を記載しております。下記をよくお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

 **警告** この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。

 **注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■絵表示の例



禁止

この記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

ご使用前・ご使用上の警告と注意



禁止

ご使用前にベッド用グリップがベッドに確実に固定されていることを確認してください。
・固定が不十分な場合、つかまった際にベッド用グリップが動き、転倒したり、身体がはさまれて怪我をする恐れがあります。



禁止

スイングアームは固定して使用してください。
・固定が不十分な場合、つかまった際にスイングアームが動き、転倒したり、身体がはさまれて怪我をする恐れがあります。



禁止

ロックハンドルを操作する際は、隙間に注意してください。
・ロックハンドルの隙間に手や指がはさまれて、怪我をする恐れがあります。



禁止

ロック解除の状態、勢いよくスイングアームを回転させないでください。
・スイングアームの破損や、手をはさむなどの事故や怪我の原因となります。



禁止

スイングアームをベッドの内側に向けて使用しないでください。
・スイングアームとベッドの間に身体や手などがはさまれて危険です。
・ベッド用グリップやベッドの故障の原因になります。



禁止

12歳以下のお子様やご自身での操作が困難な方に操作をさせないでください。
・誤った使用によりベッドやベッド用グリップに身体がはさまれるなどの事故の原因になります。ご自身での操作が困難な場合は、付添いの方が操作をおこなってください。



禁止

乳幼児やお子様には使用しないでください。
・ベッド用グリップなどの隙間にはさまれて怪我をしたり、転落する恐れがあります。



禁止

商品の上に腰かけたり、ぶら下がったり、商品を持ってベッドを移動させたりするなどの無理な力を加えるような使いかたはしないでください。
・破損や事故の原因になります。

ご使用前・ご使用上の警告と注意



ベッド用グリップとボードやサイドレールなどの隙間に身体の一部（特に頭や首）が入らないようにご注意ください。

- ・隙間にはさまれ、怪我をする恐れがあります。
- ・スイングアームの角度を変更した場合、ボードや並列するサイドレールとの隙間が変化するため十分にご確認ください。



動く部分に手などをはさまないように操作してください。

衣類が引っかからないようにご注意ください。

- ・ベッド固定レバーおよびロックハンドルの隙間やスイングアームと本体の隙間にはさまれると、怪我をする恐れがあります。



ベッド用グリップの隙間に身体の一部が入らないようにご注意ください。

・隙間にはさまれ怪我をする恐れがあります。

- ・使用する方の状態や必要に応じて、別売りのPG02・PG03用安全カバーをご確認ください。



指定以外のベッドに取り付けて使用しないでください。

当社が指定する適合品以外の商品と組み合わせて使用しないでください。

- ・意図せぬ隙間や商品同士の接触などにより、破損や事故の原因になります。



分解や改造はしないでください。

- ・破損や事故の原因になります。



商品は定期的に点検してください。

- ・定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損・変形の有無およびベッド用グリップがベッドに確実に固定されていることを点検してください。商品に異常があるまま使用された場合に、怪我をする恐れがあります。



可動部に水などをこぼさないでください。


濡れた手でロック / 解除操作をしないでください。

- ・故障の原因になります。


重要なお知らせと注意事項

本商品と組み合わせ不適合なサイドレールを使用されますと「危険な隙間」が発生します。サイドレールと組み合わせて使用される場合は各ベッド本体の取扱説明書をご参照ください。

- 不適合商品との組み合わせは、怪我や重大事故の原因になりますのでご注意ください。(P8：適合ベッド参照)

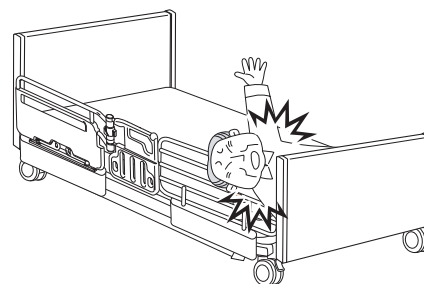

各部の名称

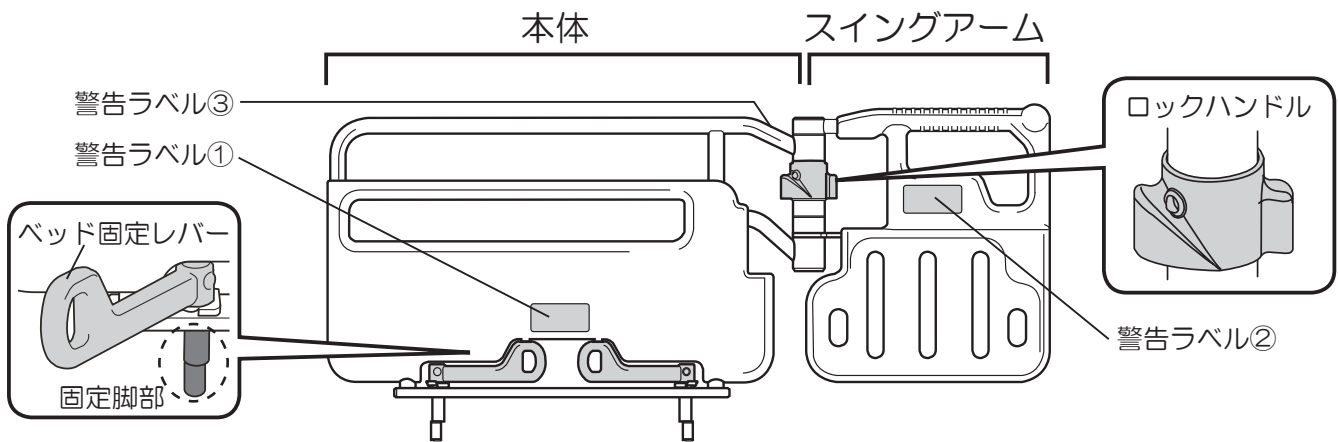

付属品の確認

- 開梱した際に、右記の付属品が同梱されているか、また破損していないか確認してください。不足や破損があった場合は、販売店または弊社までご連絡ください。


■取扱説明書……………1冊



警告ラベルについて

- 本商品をお使いになる方に、特に注意していただきたい項目をラベルにして貼っています。
- 警告ラベルが傷ついたり、はがれたりした場合は新しいラベルを取り寄せ、貼り直してください。

警告ラベル①

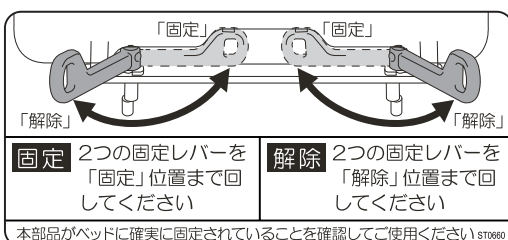

警告ラベル②

■解除の方法

- ①「ロックハンドル」を矢印方向へ回します
- ②カチッと音がするまで下ろすと止まります
※スイングアームに負荷がかかっているとロック解除はできません
- ③ロック解除されると赤のシールが見えます

■ロックの方法


スイングアームを45°回すとロックハンドルが上がり、自動でロックされます

⚠ 警告

- ・スイングアーム部や本体部の固定を確認してからご使用ください
- ・身体の一部(特に頭や首)がはさまれ、怪我をする恐れがありますので、隙間にご注意ください
- ・動く部分に手指などをはさまれないようご注意ください



株式会社プラッツ ST0658

警告ラベル③

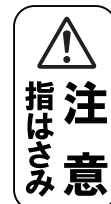

ベッドへの取り付け方法

スイングアームがロックされていることを確認してから取り付けてください。

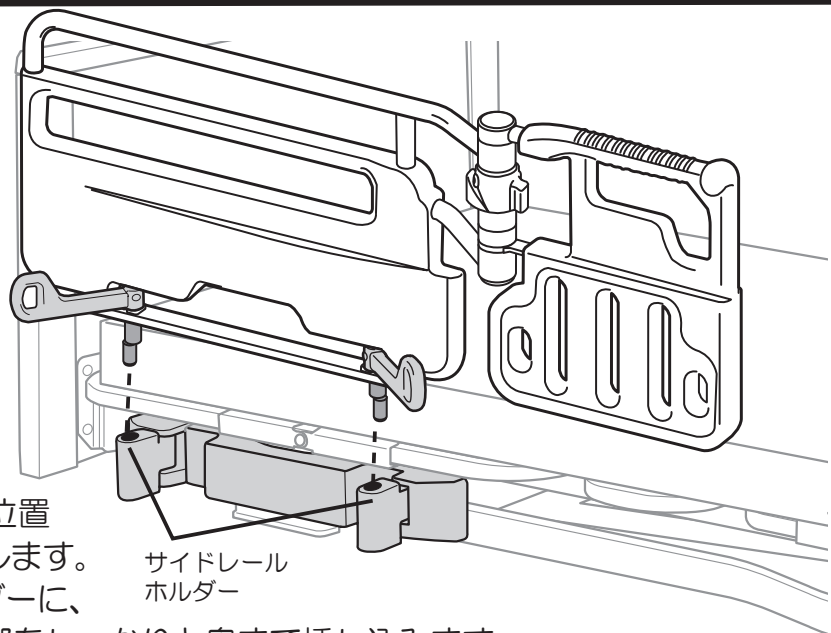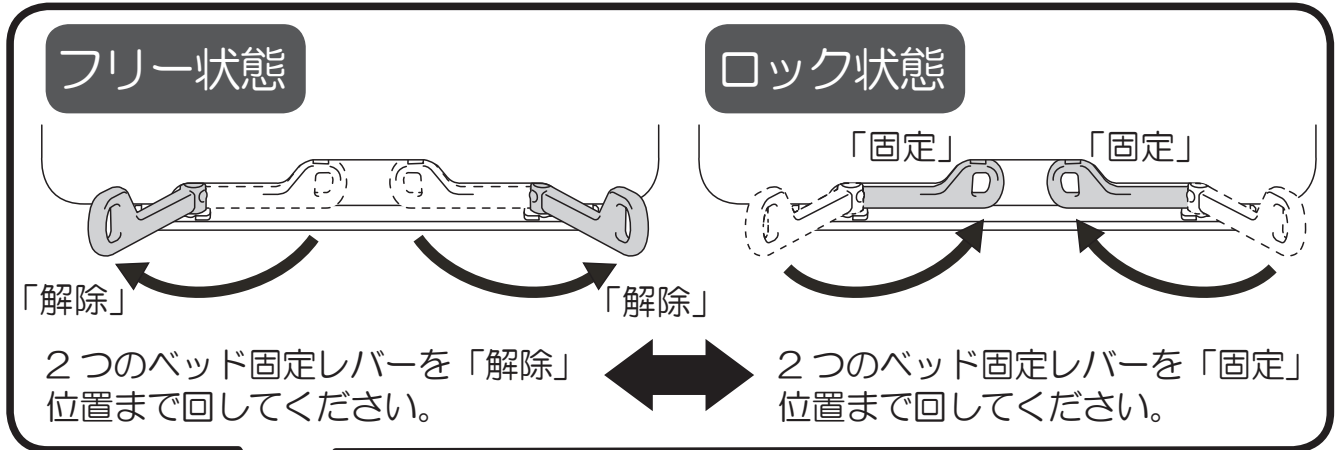

- ①ベッド固定レバーを「解除」位置まで回し、**フリー状態**にします。
 - ②ベッドのサイドレールホルダーに、ベッド用グリップの固定脚部をしっかりと奥まで挿し込みます。
 - ③2つの固定レバーを「固定」位置まで回し、**ロック状態**にします。
- ※固定したベッド用グリップ本体を、サイドレールホルダーから引き抜くように力を加えて、抜けないことを確認してください。



警告

「ベッド用グリップ」が確実にベッドに固定されている事を確認してください。固定が不完全だと、破損や事故、怪我の原因になります。

取り外し方法


スイングアームがロックされていることを確認してから取り外してください。

- ①ベッド固定レバーをベッド外側の「解除」位置まで回し、フリー状態にします。
- ②本体フレームを持って、真っ直ぐ引き上げ、固定脚部をベッドのサイドレールホルダーから抜いてください。

スイングアームの解除 / ロック方法


スイングアームのロックを解除するときは、ロックハンドルを押さえたまま「カチッ」と音がするまで降ろすとロックが解除されます。

スイングアームを 45° 回すとロックハンドルが上がり、自動でロックされます。

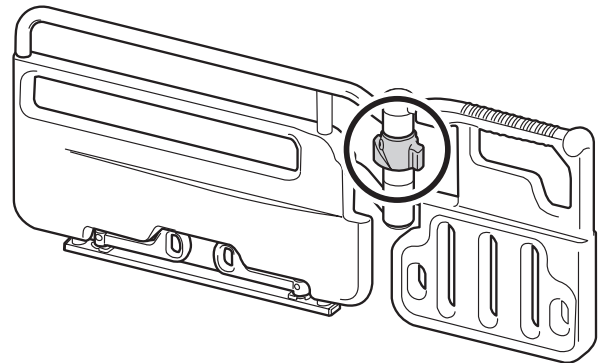


ロック解除の方法


①ロックハンドルを止まるまで回します。

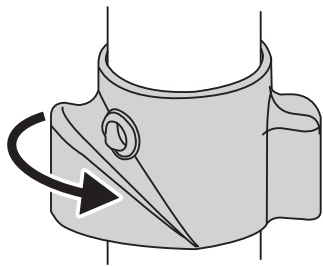

②ロックハンドルを回したまま「カチッ」と音がするまで降ろすと止まります。

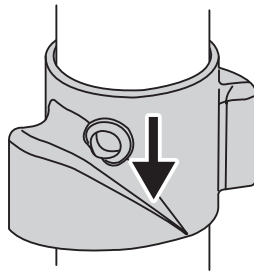


③ロック解除されると**赤いシール**が見えます。

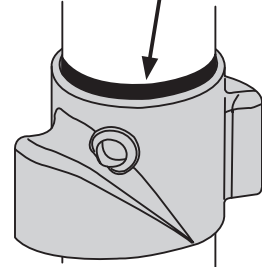


ロックの方法

①スイングアームを 45° 回すと

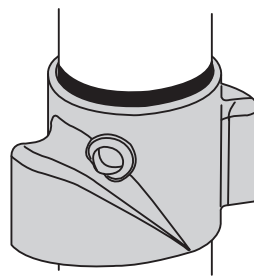


②ロックハンドルが上がり、自動でロックされます。

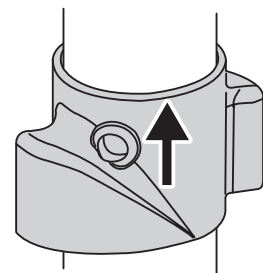

一度に 45° 以上を回転させる場合

「ロック解除」された状態でロックハンドルを押さえながら、スイングアームをゆっくり回します。

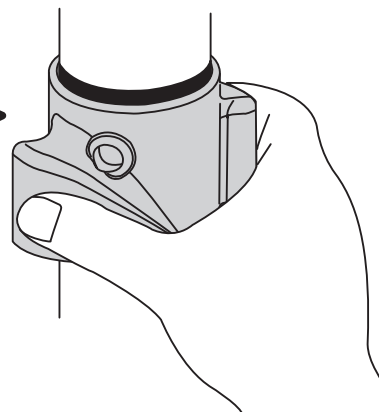


押さえた手を放すとロックハンドルが上がり、自動でロックされます。

使用方法

スイングアームの角度設定

- ロックハンドルの操作によって、スイングアームの角度を45°刻みで設定できます。スイングアームをゆっくり回すと45°刻みで止まります。ベッドからの立ち上がりなど目的にあった角度に設定してください。角度設定後は、スイングアームが確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

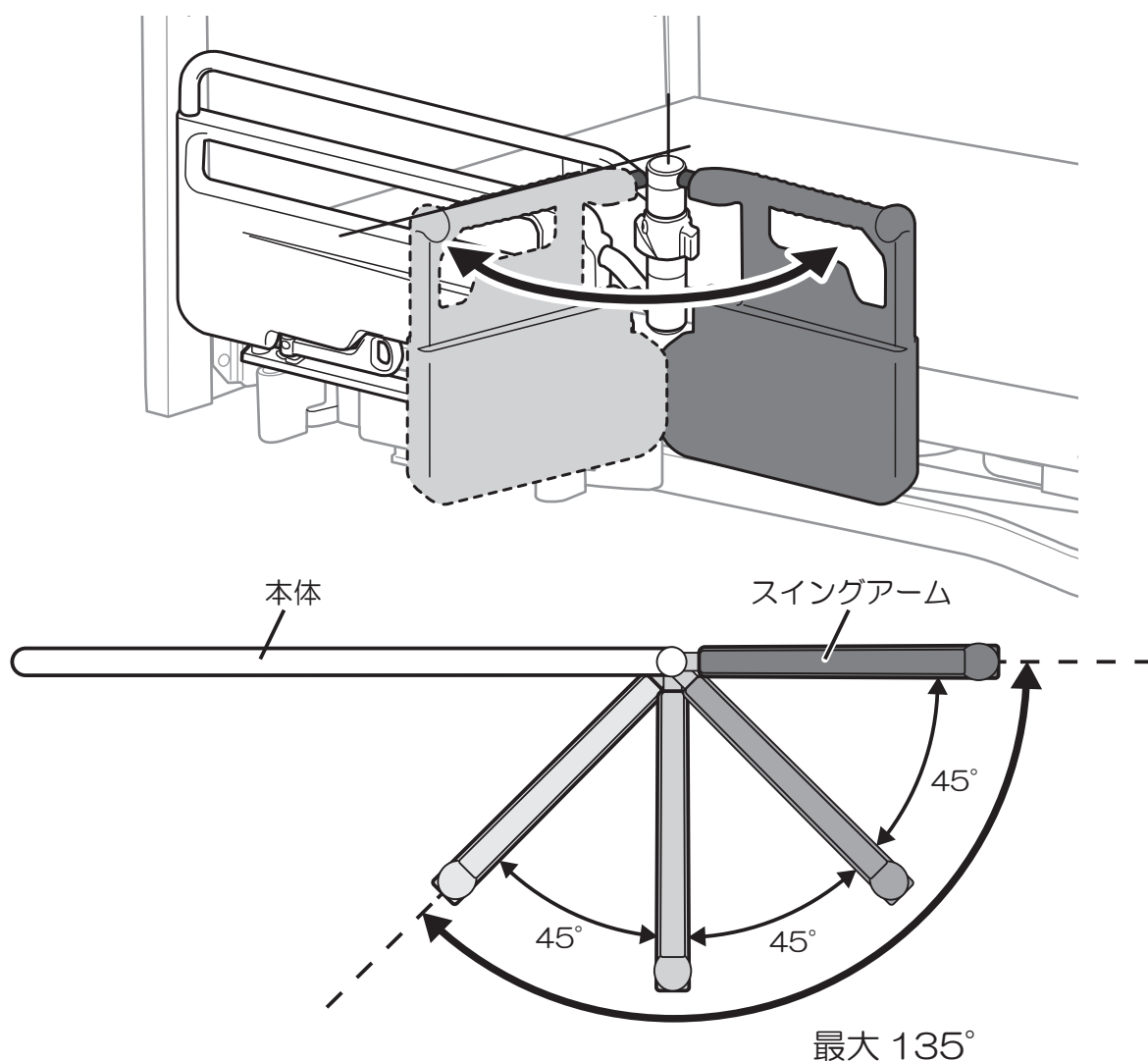

警告


「スイングアーム」が確実に固定されている事を確認してください。
固定が不完全だと、破損や事故、怪我の原因になります。

各種サイドレールとの組み合わせについて

本商品を各種サイドレールと組み合わせてご使用される場合は、危険な隙間が発生しないようにご注意ください。組み合わせの詳細につきましては、下記の適合表または各ベッド本体の取扱説明書をご参照ください。

重要なお知らせと注意事項

- 不適合商品との組み合わせは、怪我や重大事故の原因になります。

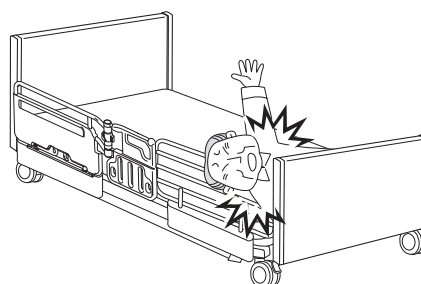

本商品と適合するベッドおよび、並列して組み合わせが可能なサイドレールは以下の通りです。

適合ベッド			並列で組み合わせ可能なサイドレール
名称	型式	JIS 認証取得	
Rafio シリーズ ※1	P110 シリーズ	○	PA505-44 PA505-75 PA500-FU44 BG-75J
Ardel シリーズ	P400 シリーズ	-	
Primolet シリーズ	PZB-ES1JFA	-	
Miolet II シリーズ	P106 シリーズ	○	PA505-44 PA505-75
Ultilet シリーズ	P109 シリーズ	-	PA501-TU41 PA501-TU79
P300 シリーズ	P300 シリーズ	-	PS01-79

※1: Rafio シリーズをロングタイプで使用する際は、別売りのロングタイプ対応スペーサー (PS03-PG0203) をご使用ください。


※: 上記 JIS 認証取得に「○」が付いているベッドと本商品の組み合わせは、JIS 認証を取得しています。



注意

当社以外のベッドに取り付けて使用しないでください。
破損や事故、怪我の原因になります。

商品の仕様

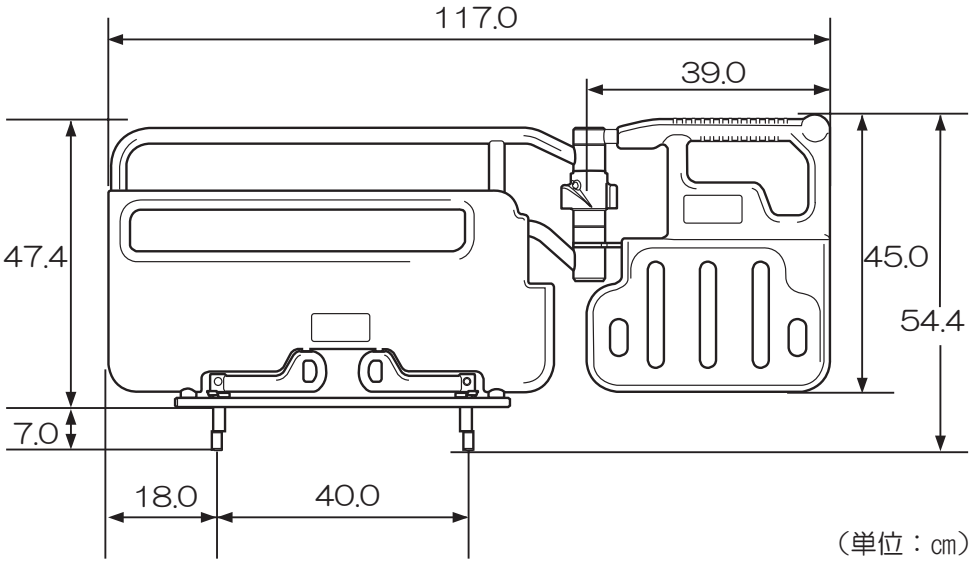型 式	PG02-116AT
商品名	ベッド用グリップ ニーパロ+ (プラス)
寸 法	 <p>(単位：cm)</p>
梱包サイズ 梱包質量 (本体質量)	119.0 cm × 54.0 cm × 7.0 cm 10.8 kg (8.9 kg)
原産国	ベトナム

お手入れ・点検

○お手入れ

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って、残った洗剤を拭き取ってください。最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。
※可動部に水や中性洗剤などを直接かけないでください。故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アセトン・磨き粉等は使用しないでください。
塗装が剥がれたり、樹脂部品が破損する恐れがあります。
- ラベルが剥がれないようご注意ください。



○点検

- 定期的に点検してください。
異常がある場合は、お買い上げの販売店かフリーアクセスまでご連絡ください。



保証とアフターサービス

よくお読みください

■サービスを依頼される場合は、お買い上げの販売店か下記フリーアクセスまでご連絡ください。




0120-77-3433

《平日 午前9時～午後5時30分》
(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

ご連絡いただきたい内容

- ①商品名および型式(表紙記載)
 - ②お買い上げの販売店
(裏表紙保証書記載)
- ・故障内容の詳細
 - ・ご住所 / お名前 / お電話番号
 - ・お買い上げ日

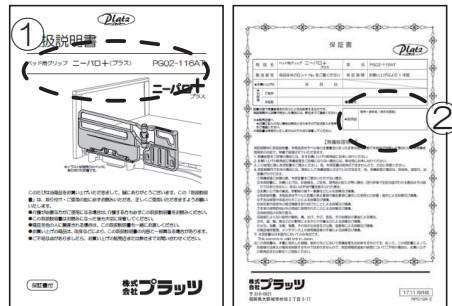

保証期間について

保証期間はお買い上げ日から1年間です。
保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

保証期間を過ぎている場合

修理および部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理いたします。

修理料金について

修理料金は、部品料、基本出張費、技術料で構成されます。

- 部品料…修理で使用した部品の料金です。
- 基本出張料…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生する費用です。
- 技術料…商品の診断・故障箇所の修理等の作業にかかる費用です。

※注：お買い上げ時の送り状等を保管いただくことをおすすめします。

プラッツ本社

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2丁目3-17 TEL:092-584-3434

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921

福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

'18.01月作成

NPO194-A