お取引様各位 2011年4月

医療・介護ベッド安全普及協議会の安全パンフレットの補足資料-その2

新聞やTV報道でもありましたが、医療・介護ベッドにおいて2002年以降37名の方がお亡くなりになられており、 消費者庁、厚労省より注意喚起が出され、医療介護ベッド安全普及協議会より安全パンフレットが配布されています。

この資料は、過去に販売していただいた弊社のベッドの「危険なすき間」に関する資料で、上記の「安全パンフレット」の補足資料として作成致しました。


お忙しい中、誠に申し訳ありませんが、安全対策へのご協力をよろしくお願いします。

株式会社プラッツ 品質管理部長 宮崎孝憲

●隙間対策

①PKB/PRBユニット [対象型式]: PKB-305シリーズ、PRB-385シリーズ、PTBシリーズ 下記の図の様に死亡につながる危険な隙間があります。下記2つの方法で対応をお願い致します。



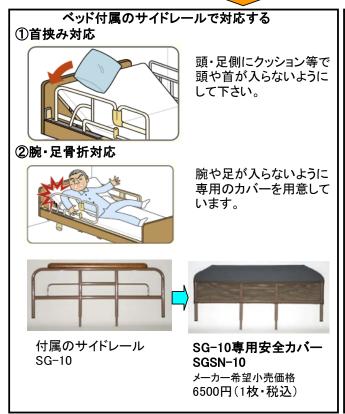




[対象型式] PSB-798シリーズ

①首挟み対応

PSB-798シリーズ



※レールとボードの隙間にはクッション等を 挿し込み首や頭の挟みこみに注意して下さい。 PSGSN-740LB

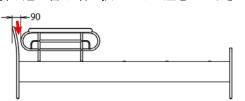

②頭や手足挿入対策



PSG-740LB専用安全カバー

メーカー希望小売価格 6500円(1枚•稅込)

[対象型式]

ケアレットシリーズ(~2010/12販売)

①首挟み対応:不要

JIS規格を満たしており 不要です。

②頭や手足挿入対策



ケアレット専用サイドレール用安全カバー PSGSN-740W

メーカー希望小売価格 6500円(1枚・税込)

ケアレット



ケアレット・ネオ

[対象型式] PKB-KV110ML



①首挟み対応:不要

図の通りボードとレールの隙間はJIS規格を 満たしており不要です。



②頭や手足挿入対策




PKB-110ML専用サイドレール用安全カバー SGSN-110ML

メーカー希望小売価格 6500円(1枚・税込)

[対象型式] 3点支持タイプ介助バー PZR-K1500



①首挟み対応

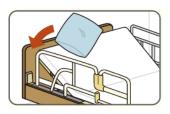

※レールとボードの隙間にはクッション等を 挿し込み首や頭の挟みこみに注意して下さい。

②頭や手足挿入対策



PZR-K1500用隙間対応ベルト PZRBL-K1500

メーカー希望小売価格 1500円(税込)

問合せ先 福岡県大野城市仲畑2-8-39 株式会社プラッツ アフターサービス係 野中 0120-77-3433