



YOCARO



H O M E C A R E B E D



Miolet III Next

プラッツはいつも 「一生懸命」です。

おかげさまでプラッツは2022年7月に、30周年を迎えることができました。これもひとえにお客様のおかげと心から厚く御礼申し上げます。
これからもプラッツは「高品質」「高機能」「低価格」のものづくりで、コストパフォーマンスに優れた商品とサービスを皆様にお届けします。汎用性の高いスタンダードモデルから、ベッド上での誤嚥リスクの低減や褥瘡予防をサポートするハイスペックモデルまで、より良い介護環境の実現に貢献できる製品をこれからも生み出していきます。

i n d e x

● 在宅介護用ベッド

ヨカロ	2
ミオレットⅢネクスト	12
ミオレットⅢ	20

● マットレス

ゼロソア	26
ゼロソア アコーネ	28
ベイスサポート	30
カタサポ	31
ユービーポイント エース	32
ユービーポイント ネクスト	33
延長マットレス	34

● 周辺機器

サイドレール	36
ハンドグリップ	37
ベッド用グリップ	38
昇降式ベッドサイドテーブル	42
オーバーテーブル	42
人感センサー付フットライト	42
床キズ防止カーペット	43
酸素ボンベホルダー	43
ミオレットⅢ専用スイッチ接続キット	43
運搬台車	43
スリムカゴ台車	43
よかレール	44

ベッドオプション適合表	48
-------------	----

在宅介護用ベッド

自立支援から重度の方の在宅医療まで
幅広くサポート

ヨカロ	2
ミオレットⅢ ネクスト	12
ミオレットⅢ	20

YOCARO

「ヨカロ」



詳しい説明や動画は
こちらから >>>



<https://www.platz-ltd.co.jp/product/yocaro/>

適合するマットレス幅：90cm幅
83cm幅

進化した背上げと業界最高クラスの床面高さで
介護でつながる皆さまに「ちょうどいい」



LINE UP 製品ラインナップ



木製フラットボード
90cm幅
83cm幅



樹脂製棚付きボード
(グレー木目調)
90cm幅
83cm幅



樹脂製棚付きボード
(ブラウンレザー調)
90cm幅
83cm幅



樹脂製棚付きボード
(無地)
90cm幅
83cm幅

より進化した「背上げ機能」と業界最高クラスの「床面高さ」で介護をサポートします




頭の角度を調節できる「ハイバックサポート機能」を改良し、可動範囲を30度まで広げました。腰に負担の少ない背上げや、食事介助や口腔ケアのための姿勢づくりもやすくなります。




床面高さは78cm*まで上げることができます。おむつ交換や体位変換を行うときの中腰の姿勢を避け、介助する方の負担を減らします。
※固定脚切り替え時の高さ

ベッドを取り扱う事業所様もサポートします

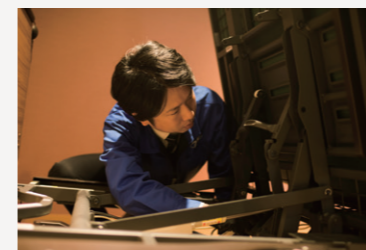

取付部品がフレームに付属している設計や自動でロックする構造などで、組み立て部品ゼロを実現。簡単に組み立てでき、部品の持ち忘れや紛失の不安もありません。パーツの共通化やモーターの後付けにより、最小限の在庫で幅広いラインナップを展開できます。


新しい背上げ。 誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に

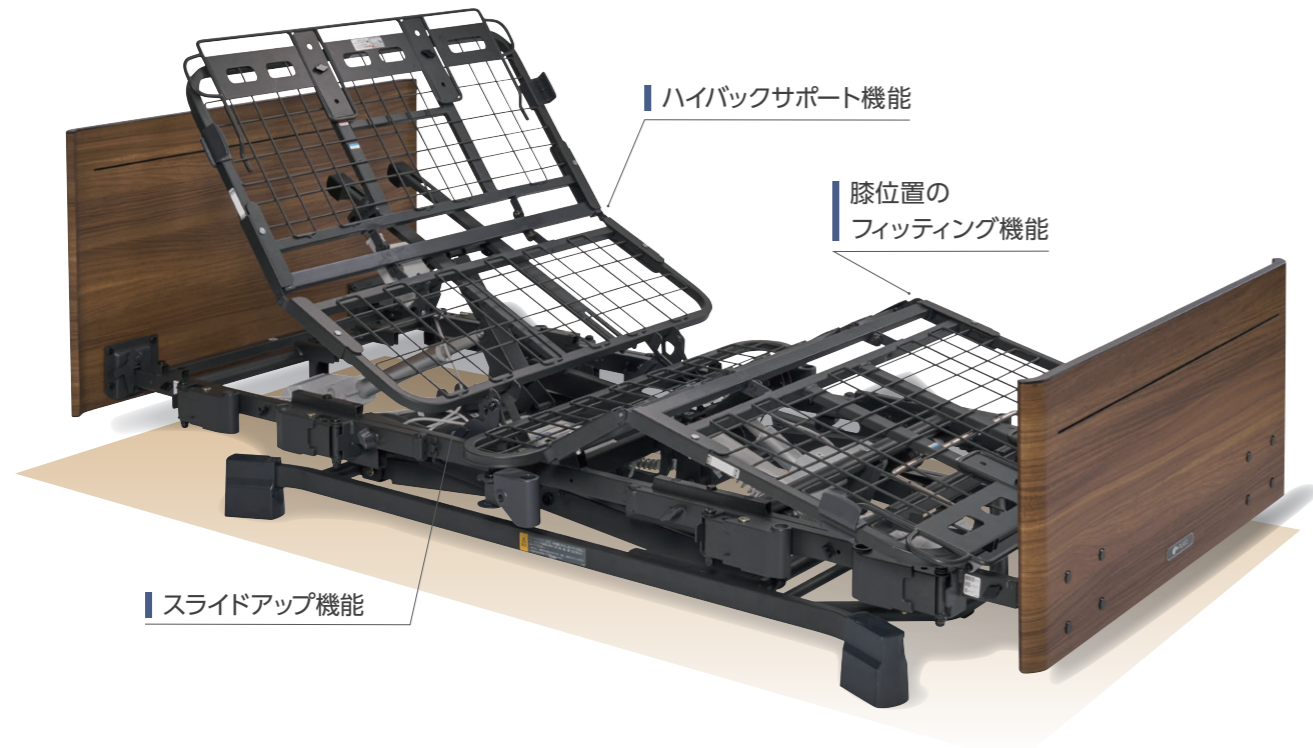

誤嚥リスク低減をサポートする、 プラッツ独自のハイバックサポート機能


ポジショニング

背骨ボトムを「ハイバック：頭-背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。ハイバックは0～30度の間で無段階に調節できます。

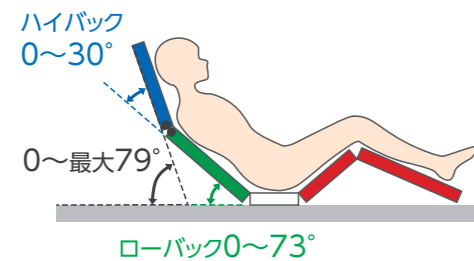

背上げ時のズレと引っ張り感を 低減するスライドアップ機能

背ボトムが後ろと上に弧をえがくようにスライドすることで、腰の押し出しを少なくし、背上げ時のズレや圧迫を抑えます。

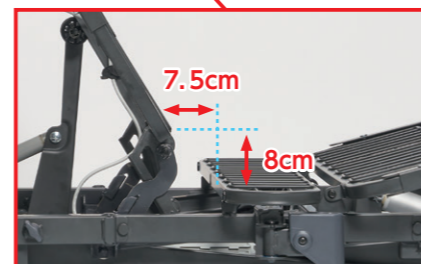


業界最高クラスの床面高さ78cm

床面高さは低床25cmから73cmまで、固定脚の切り替えで78cmまで調節できます。おむつ交換や体位変換を行うときの腰への負担を軽減します。また、昇降時はベッドが横にスイングしないので、設置面積が少なくて済みます。




むくみの改善にも対応できるひざ上げ角度

ひざ上げの角度は33°まで上げることができます。足先の上げ/下げもワンタッチで切り替えでき、脚のむくみ予防、浮腫の軽減をサポートします。

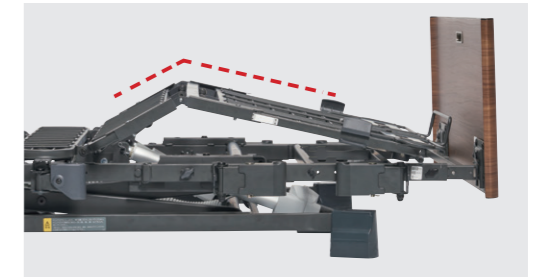

足先下げ

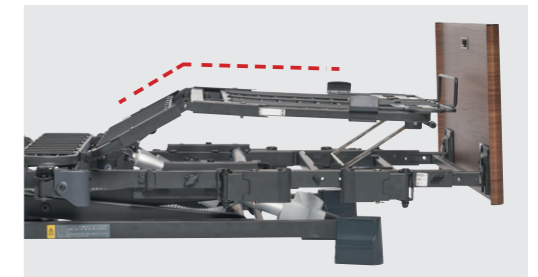


足先上げ

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能


大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

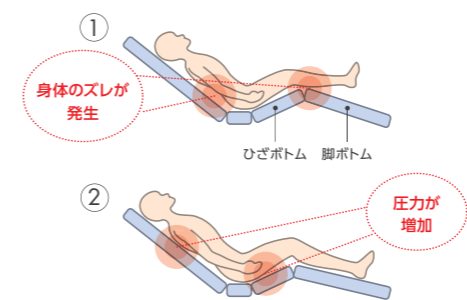

⚠️ 褥瘡(床ずれ)の原因になります

ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!

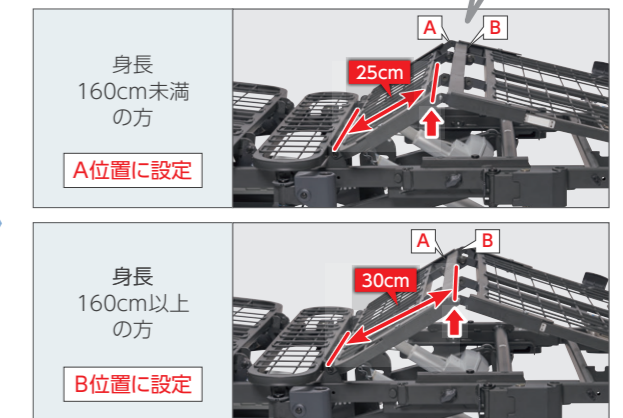

背上げのズレ・背圧を軽減するリクライニング動作

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらハイバック・ローバック・膝がそれぞれ動き、快適なリクライニング姿勢を実現。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大73°を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。

枕元を整理できる、簡単収納の棚付きボード

樹脂製ボードには、ワンタッチで開閉できる収納式の棚を標準装備。生活や介護に必要な小物を置けるので、枕元の整理にも便利です。棚は樹脂製のため、清拭にも対応し衛生的に保てます。



サイドレールの中央差し・ワンタッチ収納のオプション受け

ベッドの中央にもオプション受けを標準装備。サイドレール1本で転落予防をサポートします。また、全てのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時には邪魔になりません。立ち上がりや車いすへの移乗がしやすいように配慮しています。



見やすい画面の液晶手元スイッチ


全ての角度と高さを1画面で表示するため、ベッドの今の状態がすぐにわかります。また食事介助や、お休みの時の角度に1ボタンで調節することができる「メモリー機能」や、動かしたくないボタンだけを停止できる「操作ロック機能」、操作結果が音でわかる「音声読み上げ機能」もあります。



組立部品ゼロを実現！

事業所様向け

組み立て時に自動でロックする構造や、取付部品がフレームに付属している設計などで、組み立て部品ゼロを実現。組み立て・分解がやすく作業時の負担を減らします。また、部品の持ち忘れや紛失の不安もありません。

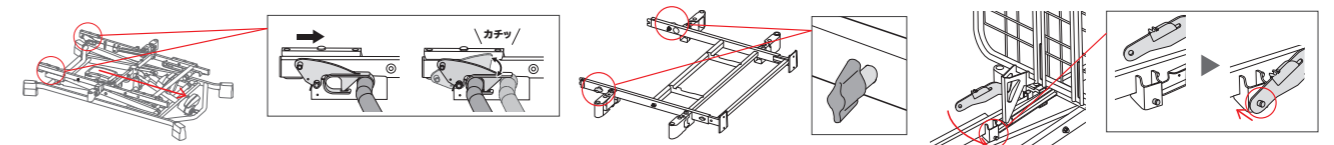

ベースフレームはセンターフレームにのせてスライドするだけで固定できます。

ノブボルトは本体に付属しています。背ボトムはワンタッチで固定できます。

異常時は手元スイッチにエラー表示

事業所様向け


ベッド使用時に異常がある場合、手元スイッチにエラーの内容が表示されます。現場ですぐに原因が特定できるので、スピーディーに対応できます。



昇降動作の速度アップ機能


事業所様向け

高さボタンとBボタンの同時押しで、通常の1.25倍速で動作します。納品時の動作チェックやメンテナンス時の効率化が図れます。

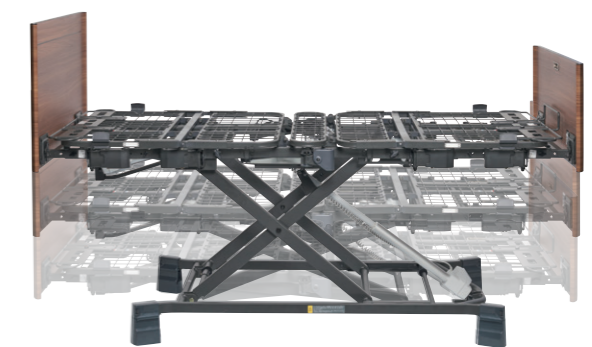

最小限の在庫で幅広いラインナップを展開

事業所様向け

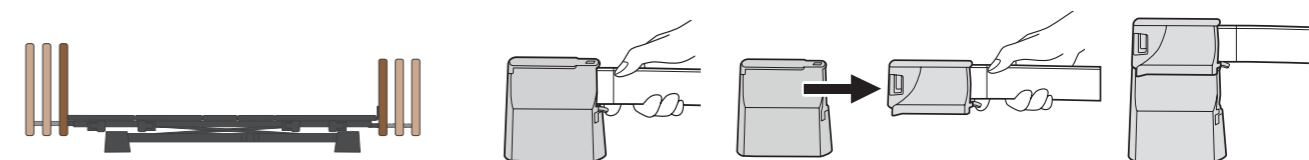


パーツの変更なしでベッドの長さを3段階に変更できます。

内蔵したかさ上げパーツで、+5cmの高さ切り替えができます。



モーターと手元スイッチの交換で、2モーターから3モーターへ変換できます。

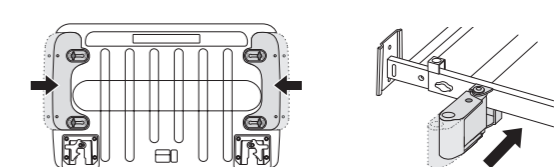

83cm幅/90cm幅への切り替えはボトムのみ(木製ボードはボトムとボード)で対応できます。

ポジショニングベッド モータータイプ

2モーター
ポジショニングベッド



3モーター
ポジショニングベッド



ポジショニングベッドシリーズ 型式

■樹脂製棚付きボード(無地)

	2モーターポジショニングベッド	3モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-61AD ■TAIS/00631-000645 ■JAN/4539940102643	P116-71AD ■TAIS/00631-000649 ■JAN/4539940103046
83cm幅	P116-62AD ■TAIS/00631-000645 ■JAN/4539940102841	P116-72AD ■TAIS/00631-000649 ■JAN/4539940103244

■樹脂製棚付きボード(グレー木目調)

	2モーターポジショニングベッド	3モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-61ADGW ■TAIS/00631-000646 ■JAN/4539940102667	P116-71ADGW ■TAIS/00631-000650 ■JAN/4539940103060
83cm幅	P116-62ADGW ■TAIS/00631-000646 ■JAN/4539940102865	P116-72ADGW ■TAIS/00631-000650 ■JAN/4539940103268

■樹脂製棚付きボード(ブラウンレザー調)

	2モーターポジショニングベッド	3モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-61ADBL ■TAIS/00631-000647 ■JAN/4539940102681	P116-71ADBL ■TAIS/00631-000651 ■JAN/4539940103084
83cm幅	P116-62ADBL ■TAIS/00631-000647 ■JAN/4539940102889	P116-72ADBL ■TAIS/00631-000651 ■JAN/4539940103282

■木製フラットボード

	2モーターポジショニングベッド	3モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-61BA ■TAIS/00631-000648 ■JAN/4539940102629	P116-71BA ■TAIS/00631-000652 ■JAN/4539940103022
83cm幅	P116-62DA ■TAIS/00631-000648 ■JAN/4539940102827	P116-72DA ■TAIS/00631-000652 ■JAN/4539940103220

※価格はオープン価格です。**非課税**

ベーシックベッド モータータイプ

昇降1モーター



背上げ1モーター




※組立時に2段階の高さに設定できます。



2モーター



3モーター

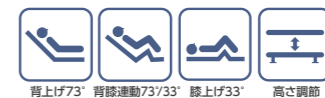

ベーシックベッドシリーズ 型式

■樹脂製棚付きボード(無地)

	昇降1モーターベーシックベッド	背上げ1モーターベーシックベッド	2モーターベーシックベッド	3モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-41AD ■TAIS/00631-000653 ■JAN/4539940102247	P116-11AD ■TAIS/00631-000657 ■JAN/4539940101035	P116-21AD ■TAIS/00631-000661 ■JAN/4539940101431	P116-31AD ■TAIS/00631-000665 ■JAN/4539940101837
83cm幅	P116-42AD ■TAIS/00631-000653 ■JAN/4539940102445	P116-12AD ■TAIS/00631-000657 ■JAN/4539940101233	P116-22AD ■TAIS/00631-000661 ■JAN/4539940101639	P116-32AD ■TAIS/00631-000665 ■JAN/4539940102049

■樹脂製棚付きボード(グレー木目調)

	昇降1モーターベーシックベッド	背上げ1モーターベーシックベッド	2モーターベーシックベッド	3モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-41ADGW ■TAIS/00631-000654 ■JAN/4539940102261	P116-11ADGW ■TAIS/00631-000658 ■JAN/4539940101059	P116-21ADGW ■TAIS/00631-000662 ■JAN/4539940101455	P116-31ADGW ■TAIS/00631-000666 ■JAN/4539940101851
83cm幅	P116-42ADGW ■TAIS/00631-000654 ■JAN/4539940102469	P116-12ADGW ■TAIS/00631-000658 ■JAN/4539940101257	P116-22ADGW ■TAIS/00631-000662 ■JAN/4539940101653	P116-32ADGW ■TAIS/00631-000666 ■JAN/4539940102063

■樹脂製棚付きボード(ブラウンレザー調)

	昇降1モーターベーシックベッド	背上げ1モーターベーシックベッド	2モーターベーシックベッド	3モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-41ADBL ■TAIS/00631-000655 ■JAN/4539940102285	P116-11ADBL ■TAIS/00631-000659 ■JAN/4539940101073	P116-21ADBL ■TAIS/00631-000663 ■JAN/4539940101479	P116-31ADBL ■TAIS/00631-000667 ■JAN/4539940101875
83cm幅	P116-42ADBL ■TAIS/00631-000655 ■JAN/4539940102483	P116-12ADBL ■TAIS/00631-000659 ■JAN/4539940101271	P116-22ADBL ■TAIS/00631-000663 ■JAN/4539940101677	P116-32ADBL ■TAIS/00631-000667 ■JAN/4539940102087

■木製フラットボード



	昇降1モーターベーシックベッド	背上げ1モーターベーシックベッド	2モーターベーシックベッド	3モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-41BA ■TAIS/00631-000656 ■JAN/4539940102223	P116-11BA ■TAIS/00631-000660 ■JAN/4539940101011	P116-21BA ■TAIS/00631-000664 ■JAN/4539940101417	P116-31BA ■TAIS/00631-000668 ■JAN/4539940101813
83cm幅	P116-42DA ■TAIS/00631-000656 ■JAN/4539940102421	P116-12DA ■TAIS/00631-000660 ■JAN/4539940101219	P116-22DA ■TAIS/00631-000664 ■JAN/4539940101615	P116-32DA ■TAIS/00631-000668 ■JAN/4539940102025

※価格はオープン価格です。
※昇降1モーターを除き、**非課税**

仕様



背上げ1モーター

■樹脂製棚付ボード(90cm幅) (単位:cm)

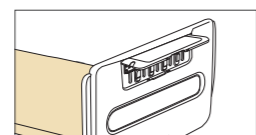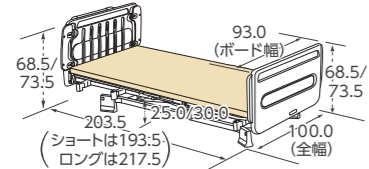



棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:208.5,ロング:232.5)cm
・棚内寸/幅 38.0cm,長さ 13.0cm

■木製フラットボード(90cm幅) (単位:cm)

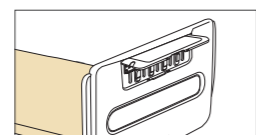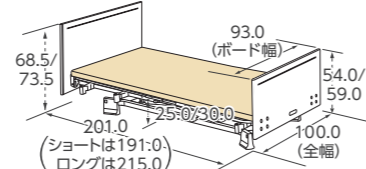



棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:191.0,ロング:215.0)cm
・棚内寸/幅 38.0cm,長さ 13.0cm

■樹脂製棚付ボード(83cm幅) (単位:cm)

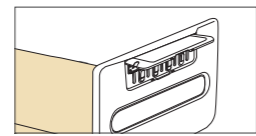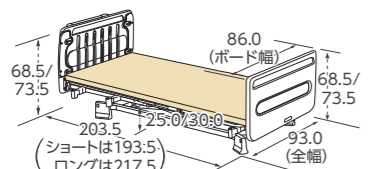

棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:208.5,ロング:232.5)cm
・棚内寸/幅 38.0cm,長さ 13.0cm

■木製フラットボード(83cm幅) (単位:cm)

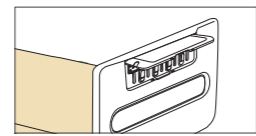
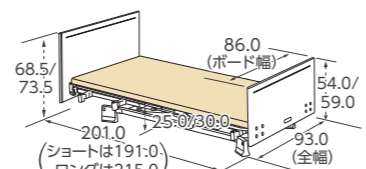


棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:191.0,ロング:215.0)cm
・棚内寸/幅 38.0cm,長さ 13.0cm

※床からベースフレームの間は5.0cmとなります。
※固定脚切替時は高さが+5.0cmになります。



昇降1モーター/2モーター/3モーター

■樹脂製棚付ボード(90cm幅) (単位:cm)

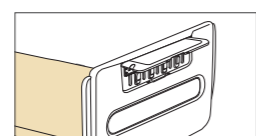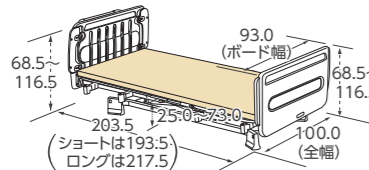



棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:208.5,ロング:232.5)cm
・棚内寸/幅 38.0cm,長さ 13.0cm

■木製フラットボード(90cm幅) (単位:cm)

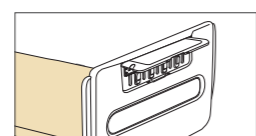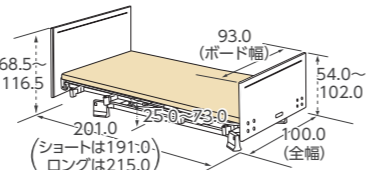



棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:191.0,ロング:215.0)cm
・棚内寸/幅 38.0cm,長さ 13.0cm

■樹脂製棚付ボード(83cm幅) (単位:cm)

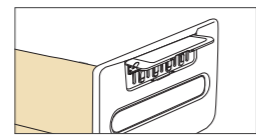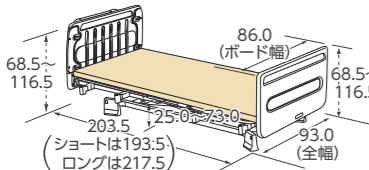

棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:208.5,ロング:232.5)cm
・棚内寸/幅 38.0cm,長さ 13.0cm

■木製フラットボード(83cm幅) (単位:cm)

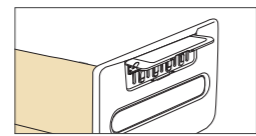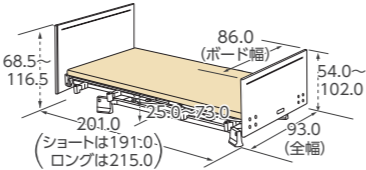

棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:191.0,ロング:215.0)cm
・棚内寸/幅 38.0cm,長さ 13.0cm

※床からベースフレームの間は5.0cmとなります。
※固定脚切替時は高さが+5.0cmになります。

		ポジショニングベッド			ベーシックベッド			
		2モーター	3モーター	昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター	
マットレス適合寸法	90cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm,ロングタイプ206.0cm)、幅88.0~91.0cm						
	83cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm,ロングタイプ206.0cm)、幅83.0cm						
質量	90cm幅	樹脂製ボード	99.5kg	100.5kg	98.5kg	98.5kg	98.5kg	99.5kg
		木製フラットボード	100.0kg	101.0kg	99.0kg	99.0kg	99.0kg	100.0kg
	83cm幅	樹脂製ボード	97.5kg	98.5kg	96.5kg	96.5kg	96.5kg	97.5kg
		木製フラットボード	97.0kg	98.0kg	96.0kg	96.0kg	96.0kg	97.0kg
梱包		6梱包(83cm幅木製フラットボードは7梱包)						
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂ボード)PE樹脂 (木製ボード)MDF、オレフィン系シート						
電動機能	ハイバック角度	0~30度			-			
	背上げ角度	0~73度			-			
	膝上げ角度	0~33度 (背上げ連動)	0~33度	-	0~33度 (背上げ連動)	0~33度	0~33度	
床面高		25.0~73.0cm/30.0~78.0cm			25.0cm/30.0cm	25.0~73.0cm/30.0~78.0cm		
定格電圧		AC100~240V						
定格消費電力		215W		95W	215W			
モーター部		LINAK社製						
最大利用者体重		138kg/安全動作荷重:174kg(1700N)						
原産国		ベッド本体・樹脂製ボード:ベトナム/木製ボード:ベトナム、中国						

専用オプション

キャスター(4個組)



装着時の床面高は+3.0cmになります。

PC03-8CK
■メーカー希望小売価格
26,000円(税込28,600円)
■TAISコード/00631-000561
■JANコード/4539940010818
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/キャスター:台湾
カバー:ベトナム

非常用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式)

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
23,000円(税込25,300円)
■TAISコード/00631-000564
■JANコード/4539940083195
■質量/1.5kg
■原産国/デンマーク

ポジショニング3モーター変換キット



ポジショニング2モーターを3モーターに変換できます。

BS116-7DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード/00631-000669
■JANコード/4539940084666

ポジショニング2モーター変換キット



ポジショニング3モーターを2モーターに変換できます。

BS116-6DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード/4539940084659

ベーシック3モーター変換キット



ベーシック2モーターを3モーターに変換できます。

BS116-3DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード/00631-000670
■JANコード/4539940084642

ベーシック2モーター変換キット



ベーシック3モーターを2モーターに変換できます。

BS116-2DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード/4539940084635

Miolet NEXT



詳しい説明や動画は
こちらから >>>



<https://www.platz-ltd.co.jp/product/miolet3next/>

適合するマットレス幅：90cm幅
83cm幅

利用者にも介護する方にも、事業者にも。
さらに使いやすさが進化したスタンダードベッド



LINE UP 製品ラインナップ



樹脂製ボード(ウェーブ)
90cm幅



樹脂製ボード(チェック)
90cm幅
83cm幅



木製フラットボード(タテ柄)
90cm幅



木製フラットボード(ヨコ柄)
90cm幅
83cm幅



木製宮付ボード(ヨコ柄)
90cm幅

ミオレットⅢから進化した、ミオレットⅢネクストのポイント

持ちやすく操作しやすい手元スイッチ

ベッドの角度や高さをわかりやすく表示します。操作ロック機能やメモリー機能、音声読み上げ機能、動作速度の「速い」モードも搭載しています。




防塵・防水性能が向上し、洗浄機にも対応

手元スイッチの防水性能が向上し、使用上の故障リスクを低減します。ベッド本体は洗浄機の使用にも対応。メンテナンス効率の向上が図れます。



垂直昇降で省スペース設置を実現 移乗のしやすさ、身体のズレ抑制機能も充実

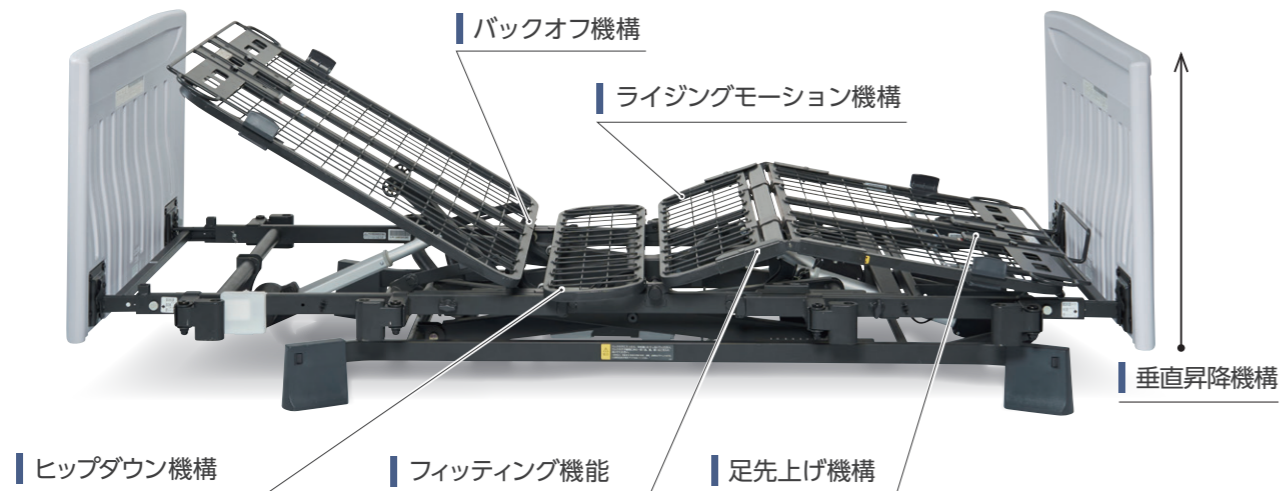

持ちやすくわかりやすい手元スイッチ

ベッドの角度や高さをわかりやすく表示します。

【メモリー機能】

好きな角度や高さを登録して、姿勢調整やお休みの時などに1ボタンで調節することができます。

【操作ロック機能】

動かしたくないボタンだけを停止します。

【音声読み上げ機能】

操作結果を音声で読み上げます。

持ちやすく、ボタンが押しやすい形状です。

防水性能が向上し、水濡れ等による使用上の故障リスクを低減します。



垂直昇降機構による省スペース設置


高さ調節はベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なくすみずみです。全長は業界トップクラスの省スペース設計を実現しました。



体格の良い方でもゆとりを持てるロングサイズ

身長やお部屋のスペースに合わせてショート・レギュラー・ロングサイズをお選びいただけます。

体格の良い方でもゆとりを持ってお休みいただけます。パーツは共通のため、サイズ変更にも別部品は必要ありません。

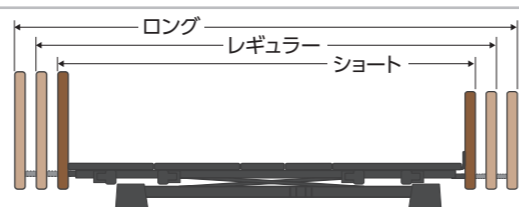


テーブルや床走行リフトの使用にも対応

低床ベッドながら、床とベースフレームとのすき間は7.5cmを確保。サイドテーブルをそのまま使用できます。ハイト Spacer を装着するとベースフレーム下は12cmとなり、一般的なリフトやお掃除ロボットの使用に対応できます。



収納式のオプション受け

全てのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時は邪魔になりません。立ち上がりや車いすへの移乗がしやすいように配慮しています。

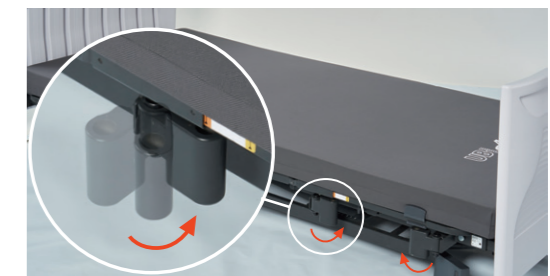


背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ設計で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。



背上げ時の姿勢を安定させるヒップダウン機構

背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こし、ずれを抑制します。

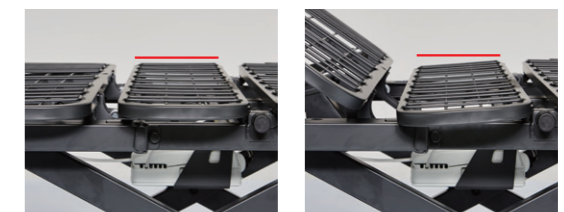

膝位置のフィッティング機能


利用者の大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調整できるので、ずれの少ない快適な背上げをサポートします。

身長を目安

175cm
未満の方




175cm
以上の方

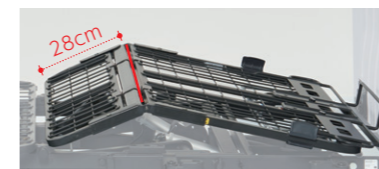

足先上げ機能


足先の角度をワンタッチで切替えます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。

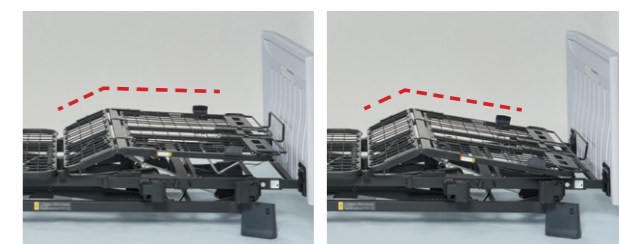

背上げ時のズレを抑える1ボタン操作のライジングモーション機構

背上げボタンを押すと、背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングをおこなうことにより、足方向へのズレを抑制します。背を上げ続けると膝は下がることで腹部の圧迫を抑え、背を上げきると膝はフラットになり端座位も取りやすくなります。

※背上げ単独動作への切り替えもワンタッチで可能です。

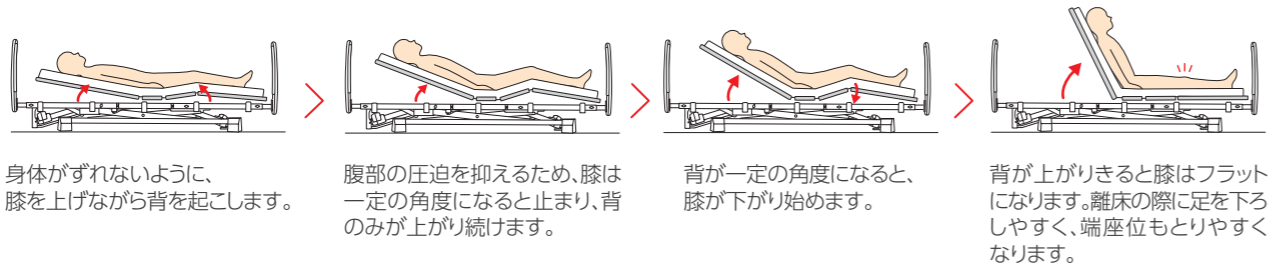

最小限の在庫で幅広いラインナップを展開

事業所様向け


1台でショート・レギュラー・ロングにサイズ調整可能。モーター変換もできるので、それぞれ専用パーツを用意する必要がありません。在庫スペースやコストの負担を軽減しながら、採用ラインナップを充実できます。

	2M	3M
ショート	サイズ切替	モーター取付 + 手元スイッチ交換
レギュラー		
ロング		

簡単組立てで納品時間を短縮

事業所様向け

ピン3本、割ピン5本の簡単組み立て。組立時間を短縮し、スムーズに納品できます。また、コツや経験に左右されないため、教育コストを削減できます。スタッフの人材不足や高齢化にも配慮しています。

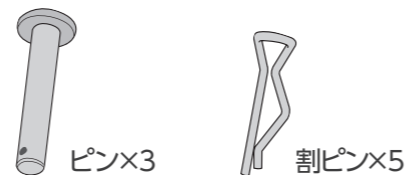

ベッド丸ごと洗浄機に対応

事業所様向け

手元スイッチ・各種モーター・コントロールボックス等すべての電装品は、防塵防水規格IP66を取得。粉塵が入らない、あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない性能を持ちます。電装品を取り外すことなく洗浄機へ投入することができるので、メンテナンスの作業効率を大幅に向上できます。 ※すべての洗浄条件に対応しているわけではありません。あらかじめ洗浄試験をおこなってください。



モータータイプ

2モーター



3モーター



型式

※価格はオープン価格です。

■樹脂製ボード(ウェーブ)

	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-23AH ■TAIS/00631-000790 ■JAN/4539940109154	P113-33AH ■TAIS/00631-000795 ■JAN/4539940109277

■樹脂製ボード(チェック)

	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-23AC ■TAIS/00631-000787 ■JAN/4539940109109	P113-33AC ■TAIS/00631-000792 ■JAN/4539940109222
83cm幅	P113-24CC ■TAIS/00631-000787 ■JAN/4539940109192	P113-34CC ■TAIS/00631-000792 ■JAN/4539940109314

■木製フラットボード(タテ柄)

	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-23BF ■TAIS/00631-000791 ■JAN/4539940109178	P113-33BF ■TAIS/00631-000796 ■JAN/4539940109291

■木製フラットボード(ヨコ柄)


	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-23BA ■TAIS/00631-000788 ■JAN/4539940109116	P113-33BA ■TAIS/00631-000793 ■JAN/4539940109239
83cm幅	P113-24DA ■TAIS/00631-000788 ■JAN/4539940109208	P113-34DA ■TAIS/00631-000793 ■JAN/4539940109321

■木製宮付ボード(ヨコ柄)


	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-23BB ■TAIS/00631-000789 ■JAN/4539940109123	P113-33BB ■TAIS/00631-000794 ■JAN/4539940109246

仕様


■ 樹脂製ボード(ウェーブ・90cm幅)

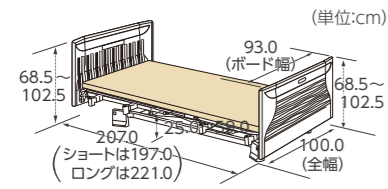


■ 樹脂製ボード(チェック・90cm幅)

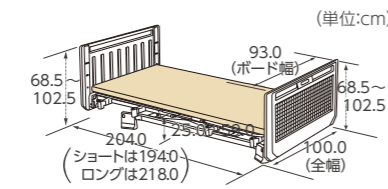


■ 木製フラットボード(タテ柄・90cm幅)

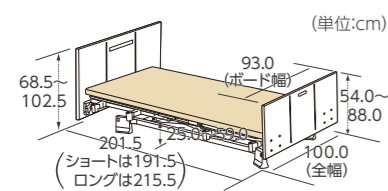


■ 木製フラットボード(ヨコ柄・90cm幅)

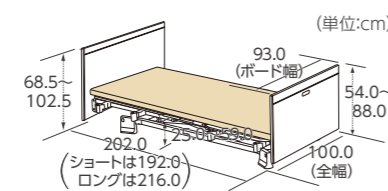


■ 木製宮付ボード(ヨコ柄・90cm幅)

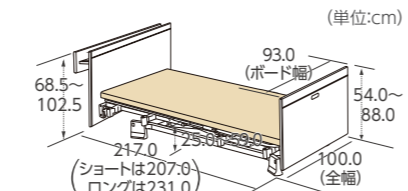

■ 樹脂製ボード(チェック・83cm幅)

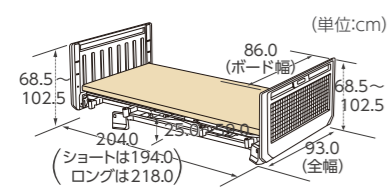

■ 木製フラットボード(ヨコ柄・83cm幅)

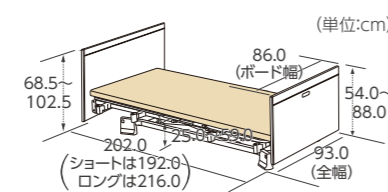

※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

		2モーター	3モーター	
マットレス適合寸法	90cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:88.0~91.0cm		
	83cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:83.0cm		
質量	90cm幅	樹脂製ボード(ウェーブ)	85.5kg	86.5kg
		樹脂製ボード(チェック)	86.0kg	87.0kg
		木製フラットボード(タテ柄)	89.5kg	90.5kg
		木製フラットボード(ヨコ柄)	88.0kg	89.0kg
	83cm幅	樹脂製ボード(チェック)	83.5kg	84.5kg
		木製フラットボード(ヨコ柄)	85.0kg	86.0kg
梱包		5梱包(木製宮付ボードは6梱包)		
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂ボード)PE樹脂 (木製ボード)MDF、オレフィン系シート		
電動機能	背上げ角度	0~70度		
	膝上げ角度	0~22度		
床面高		25.0~59.0cm		
定格電圧		AC100V~240V		
定格消費電力		150W		
モーター部		TIMOTION社製		
最大利用者体重		138kg/安全動作荷重:174kg(1700N)		
原産国		ベトナム		

専用オプション

ハイトスペーサー(4個組)



装着時の床面高は+4.5cmになります。

PH05-45
 ■メーカー希望小売価格
8,000円(税込8,800円)
 ■TAISコード/00631-000562
 ■JANコード/4539940010825
 ■材質/ABS樹脂
 ■原産国/ベトナム
 ※キャスターとの併用はできません。

キャスター(4個組)



装着時の床面高は+1.5cmになります。

PC03-8CK
 ■メーカー希望小売価格
26,000円(税込28,600円)
 ■TAISコード/00631-000561
 ■JANコード/4539940010818
 ■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
 ■原産国/キャスター:台湾
 カバー:ベトナム

ミオレットⅢネクスト専用 3モーター変換キット



ミオレットⅢネクストの2モーターから3モーターへ変換できます。

BS-003
 ■メーカー希望小売価格
オープン価格
 ■TAISコード/00631-000797
 ■JANコード/4539940084772

ミオレットⅢネクスト専用 2モーター変換キット



ミオレットⅢネクストの3モーターから2モーターへ変換できます。

BS-004
 ■メーカー希望小売価格
オープン価格
 ■JANコード/4539940084789

ミオレットⅢネクスト電装品セット 2モーター



ミオレットⅢ2モーターをミオレットⅢネクスト2モーターに変換できます。

PP113-NX2
 ■メーカー希望小売価格
オープン価格
 ■JANコード/4539940084758

ミオレットⅢネクスト電装品セット 3モーター



ミオレットⅢ3モーターをミオレットⅢネクスト3モーターに変換できます。

PP113-NX3
 ■メーカー希望小売価格
オープン価格
 ■JANコード/4539940084765

ミオレットシリーズ
MioletⅢ



詳しい説明や動画は
こちらから >>>



<https://www.platz-ltd.co.jp/product/miolet/miolet3>

適合するマットレス幅：90cm幅
83cm幅

利用者にも事業者にも優しい
新しい時代に対応するマルチなスタンダードベッド



LINE UP 製品ラインナップ



樹脂製ボード(チェック)
90cm幅
83cm幅



木製フラットボード(ヨコ柄)
90cm幅
83cm幅



木製宮付ボード(ヨコ柄)
90cm幅

利用者に優しいポイント


Point 1

車いすへ移乗しやすい




Point 2

背上げ時のズレ軽減

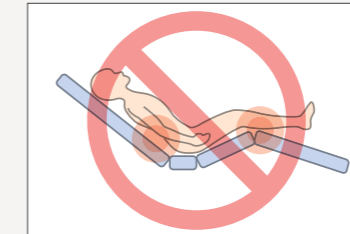

Point 3

省スペース設置

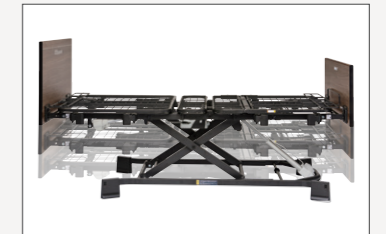

事業者にも優しいポイント

Point 1

1台6役で在庫負担を軽減

	2M	3M
ショート	サイズ切替	モーター 取付 + 手元 スイッチ 交換
レギュラー	↑	
ロング	↓	

Point 2

部品8個で簡単組み立て



Point 3

パーツの軽量化



モータータイプ

昇降1モーター



背上げ1モーター




※組立時に2段階の高さに設定できます。

2モーター



3モーター

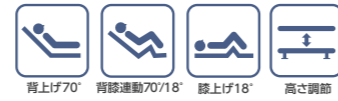

型式

※価格はオープン価格です。
※昇降1モーターを除き、**非課税**

■ 樹脂製ボード (チェック)

	昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-41AC ■TAIS/00631-000572 ■JAN/4539940083744	P113-11AC ■TAIS/00631-000549 ■JAN/4539940010573	P113-21AC ■TAIS/00631-000553 ■JAN/4539940010627	P113-31AC ■TAIS/00631-000557 ■JAN/4539940010672
83cm幅	P113-42CC ■TAIS/00631-000572 ■JAN/4539940083751	P113-12CC ■TAIS/00631-000549 ■JAN/4539940010726	P113-22CC ■TAIS/00631-000553 ■JAN/4539940010757	P113-32CC ■TAIS/00631-000557 ■JAN/4539940010788

■ 木製フラットボード (ヨコ柄)

	昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-41BA ■TAIS/00631-000573 ■JAN/4539940083768	P113-11BA ■TAIS/00631-000550 ■JAN/4539940010580	P113-21BA ■TAIS/00631-000554 ■JAN/4539940010634	P113-31BA ■TAIS/00631-000558 ■JAN/4539940010689
83cm幅	P113-42DA ■TAIS/00631-000573 ■JAN/4539940083775	P113-12DA ■TAIS/00631-000550 ■JAN/4539940010733	P113-22DA ■TAIS/00631-000554 ■JAN/4539940010764	P113-32DA ■TAIS/00631-000558 ■JAN/4539940010795


■ 木製宮付ボード (ヨコ柄)

	昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-41BB ■TAIS/00631-000574 ■JAN/4539940083782	P113-11BB ■TAIS/00631-000551 ■JAN/4539940010597	P113-21BB ■TAIS/00631-000555 ■JAN/4539940010641	P113-31BB ■TAIS/00631-000559 ■JAN/4539940010696


仕様

背上げ1モーター


■ 樹脂製ボード(チェック・90cm幅)

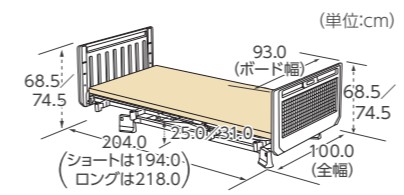


■ 木製フラットボード(ヨコ柄・90cm幅)

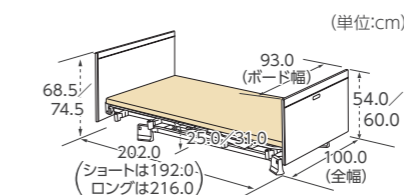


■ 木製宮付ボード(ヨコ柄・90cm幅)

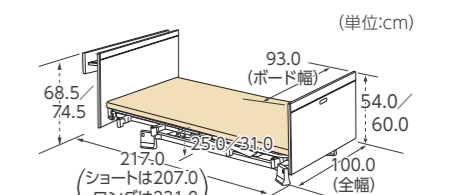

■ 樹脂製ボード(チェック・83cm幅)

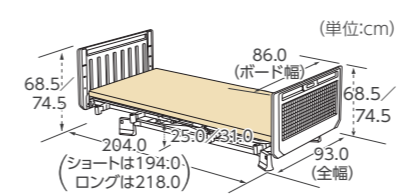


■ 木製フラットボード(ヨコ柄・83cm幅)

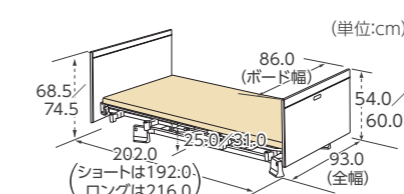


※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

昇降1モーター/2モーター/3モーター


■ 樹脂製ボード(チェック・90cm幅)

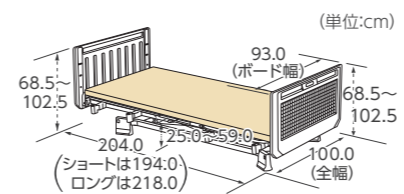


■ 木製フラットボード(ヨコ柄・90cm幅)

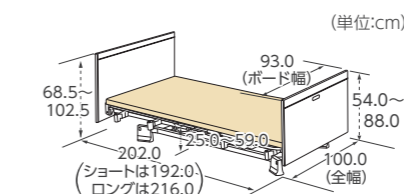


■ 木製宮付ボード(ヨコ柄・90cm幅)

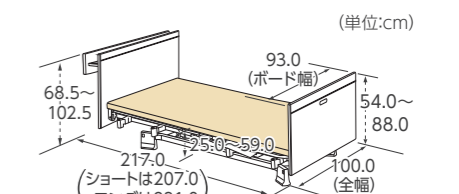

■ 樹脂製ボード(チェック・83cm幅)

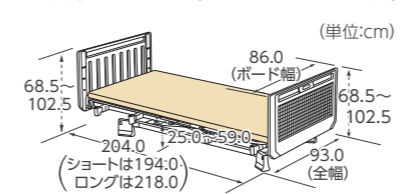

■ 木製フラットボード(ヨコ柄・83cm幅)

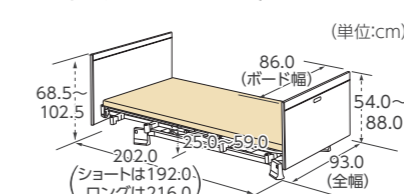

※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

仕様

		昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター	
マットレス適合寸法	90cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:88.0~91.0cm				
	83cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:83.0cm				
質量	90cm幅	樹脂製ボード(チェック)	85.5kg	84.0kg	85.5kg	86.5kg
		木製フラットボード(ヨコ柄)	87.5kg	86.0kg	87.5kg	88.5kg
		木製宮付ボード(ヨコ柄)	91.5kg	90.0kg	91.5kg	92.5kg
	83cm幅	樹脂製ボード(チェック)	83.0kg	81.5kg	83.0kg	84.0kg
		木製フラットボード(ヨコ柄)	84.5kg	83.0kg	84.5kg	85.5kg
梱包		5梱包(木製宮付ボードは6梱包)				
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂ボード)PE樹脂 (木製ボード)MDF、オレフィン系シート				
電動機能	背上げ角度	—	0~70度		—	
	膝上げ角度	—	0~22度(背上げ連動)		0~18度	
床面高		25.0~59.0cm	25.0/31.0cm(2段階)	25.0~59.0cm		
定格電圧		AC100V~240V				
定格消費電力		150W	100W	150W		
モーター部		LINAK社製				
最大利用者体重		138kg/安全動作荷重:174kg(1700N)				
原産国		ベトナム				

専用オプション

ハイトスペーサー(4個組)



装着時の床面高は+4.5cmになります。

PH05-45
 ■メーカー希望小売価格
8,000円(税込8,800円)
 ■TAISコード/00631-000562
 ■JANコード/4539940010825
 ■材質/ABS樹脂
 ■原産国/ベトナム
 ※キャスターとの併用はできません。


キャスター(4個組)



装着時の床面高は+1.5cmになります。

PC03-8CK
 ■メーカー希望小売価格
26,000円(税込28,600円)
 ■TAISコード/00631-000561
 ■JANコード/4539940010818
 ■材質/ナイロン、ポリウレタン、
 スチール、ABS樹脂
 ■原産国/キャスター:台湾
 カバー:ベトナム

ミオレットⅢ専用
3モーター変換キット(2モーター → 3モーター)

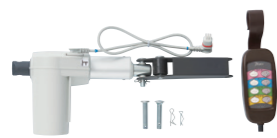

2モーターから3モーターへ変換できます。

BS-001
 ■メーカー希望小売価格
オープン価格
 ■TAISコード/00631-000563
 ■JANコード/4539940010832

ミオレットⅢ専用
2モーター変換キット(3モーター → 2モーター)



3モーターから2モーターへ変換できます。

BS-002
 ■メーカー希望小売価格
オープン価格
 ■JANコード/4539940010849

マットレス

ベッドを使う方の環境を考えた
開発されたマットレス

マットレス

ゼロソア	26
ゼロソア アコーネ	28
ベイスサポート	30
カタサボ	31
ユービーポイント エース	32
ユービーポイント ネグスト	33
延長マットレス	34

ゼロソア

優れた体圧分散性に、適度な反発力で動きやすさをプラス。
自立促進をサポートする床ずれ防止マットレス

- 難燃
- MRSA 抗菌
- 防水



通気タイプ

■メーカー希望小売価格 **90,000円(税込99,000円)**

- 90cm幅**
- レギュラータイプ **PM18-A9012**
■TAISコード/00631-000642 ■JANコード/4539940061636
- ショートタイプ **PM18-A9012S**
■TAISコード/00631-000642 ■JANコード/4539940061827

■寸法/幅90.0×厚さ12.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/7.5kg(ショート7.0kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅

- レギュラータイプ **PM18-A8312**
■TAISコード/00631-000642 ■JANコード/4539940061643
- ショートタイプ **PM18-A8312S**
■TAISコード/00631-000642 ■JANコード/4539940061834

■寸法/幅83.0×厚さ12.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/7.0kg(ショート6.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 **101,000円(税込111,100円)**

- 90cm幅**
- レギュラータイプ **PM19-A9012**
■TAISコード/00631-000643 ■JANコード/4539940061650
- ショートタイプ **PM19-A9012S**
■TAISコード/00631-000643 ■JANコード/4539940061841

■寸法/幅90.0×厚さ12.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/8.0kg(ショート7.5kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅

- レギュラータイプ **PM19-A8312**
■TAISコード/00631-000643 ■JANコード/4539940061667
- ショートタイプ **PM19-A8312S**
■TAISコード/00631-000643 ■JANコード/4539940061858


■寸法/幅83.0×厚さ12.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/7.5kg(ショート7.0kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。


優れた体圧分散性

身体の部位に合わせて施したプロファイル加工の上に薄い層を重ねることで、優れた体圧分散効果を発揮します。

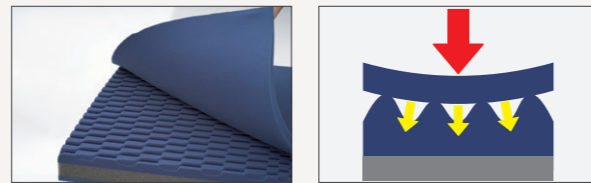


寝返りしやすい

適度な反発性により沈み込みすぎず、動きを阻害しません。寝返りや起き上がり時の動きやすさをサポートすることで、ご利用者の身体機能をしっかりと活かし自立を促進します。一般的に、反発力が高いと硬いイメージがあり身体へのフィット感が懸念されますが、本製品では反発力を担保しながら柔らかさによる体圧分散性を実現したウレタンを採用しています。

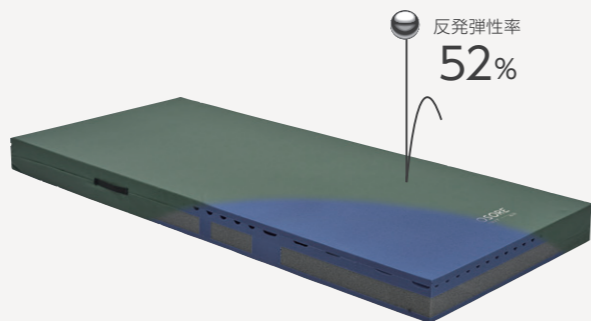


背上げ時もズレを軽減

伸び率320%の伸縮性の高いウレタンをベッドの屈曲位置と最下層に配置することで、厚さ12cmでも曲がりやすさを向上させています。ベッドの動きに追従するのでベッドの機能を活かし、身体にかかるずれ力や圧迫感を軽減します。


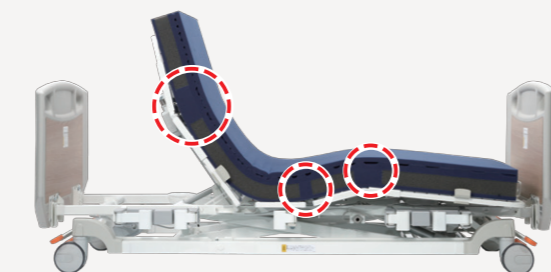


背上げ時の底付き感を防ぎます

身体全体をしっかりと受け止めて沈み込みを軽減し、また、背上げ時の底付きを防ぎます。姿勢の崩れを防ぎ、ご利用者の安定感をサポートします。

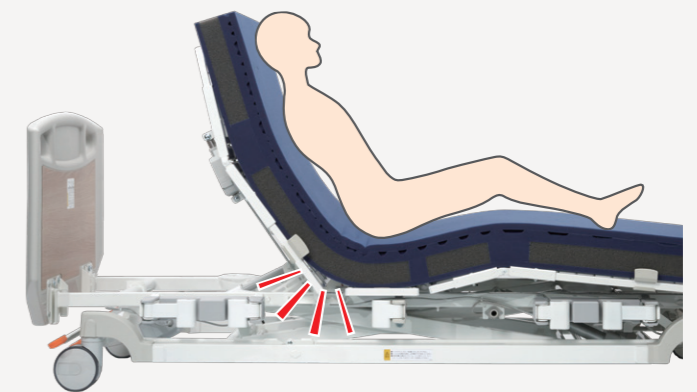

体圧分散データ

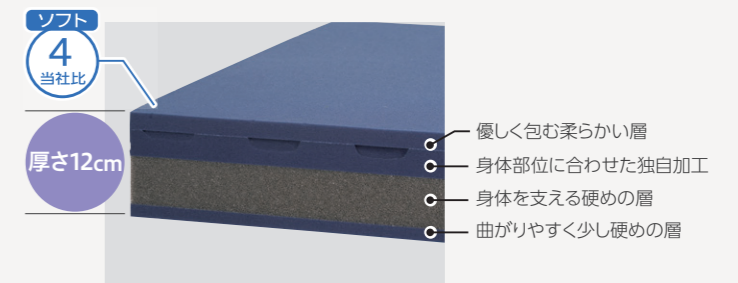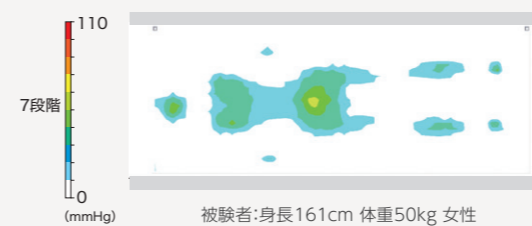

開発協力: 田中マキ子先生(山口県立大学 学長)

ゼロソア アコーネ

新発想のじゃばら構造が、マットレスの伸縮と屈曲をアシスト。ベッドの快適な背上げ機能を最大限に活かします

- 難燃
- MRSA 抗菌
- 速乾
- 防水



通気タイプ

■メーカー希望小売価格 **84,000円(税込92,400円)**

90cm幅	レギュラータイプ PM21-A9010
	■TAISコード/00631-000703 ■JANコード/4539940061698
	ショートタイプ PM21-A9010S
	■TAISコード/00631-000703 ■JANコード/4539940061704

■寸法/幅90.0×厚さ10.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
 ■質量/6.0kg(ショート5.5kg)
 ■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
 ■原産国/日本

83cm幅

83cm幅	レギュラータイプ PM21-A8310
	■TAISコード/00631-000703 ■JANコード/4539940061711
	ショートタイプ PM21-A8310S
	■TAISコード/00631-000703 ■JANコード/4539940061728

■寸法/幅83.0×厚さ10.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
 ■質量/5.5kg(ショート5.0kg)
 ■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
 ■原産国/日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 **95,000円(税込104,500円)**

90cm幅	レギュラータイプ PM22-A9010
	■TAISコード/00631-000704 ■JANコード/4539940061735
	ショートタイプ PM22-A9010S
	■TAISコード/00631-000704 ■JANコード/4539940061742

■寸法/幅90.0×厚さ10.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
 ■質量/6.0kg(ショート5.5kg)
 ■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
 ■原産国/日本

83cm幅


83cm幅	レギュラータイプ PM22-A8310
	■TAISコード/00631-000704 ■JANコード/4539940061759
	ショートタイプ PM22-A8310S
	■TAISコード/00631-000704 ■JANコード/4539940061766

■寸法/幅83.0×厚さ10.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
 ■質量/5.5kg(ショート5.0kg)
 ■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
 ■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

プラッツ独自のウレタン加工が、背上げの不快感や圧力の軽減をサポートします

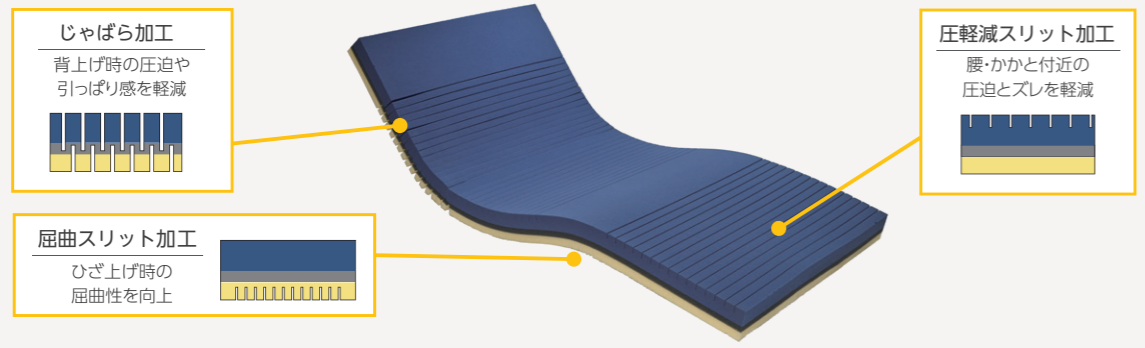

背上げ時の苦しさを改善する「じゃばらアシスト機能」


背部に配置した「じゃばら」の伸縮により、背上げ時にかかる圧迫をマットレスが低減させます。



- **背中への圧迫を低減**
じゃばらの伸縮がベッドと身体とのズレを吸収するので、背中への圧迫や引っぱり感を低減します。
- **背上げ時の姿勢保持をサポート**
背部の動きを邪魔しないことで、腰椎の前弯(腰の反り)を防いで自然なS字カーブを実現。ベッド上での快適な座位姿勢をサポートします。
- **側臥位の寝心地も向上**
スリットが身体の凹凸にあわせて沈み込むことでフィットし、側臥位の際の肩から腰にかかる圧力を和らげます。

優れた体圧分散性

床ずれ防止マットレスにも採用している高性能ウレタンを表面に使用。背中・腰・かかと付近に施した表面のスリット加工との相乗効果で、優れた体圧分散効果を発揮します。

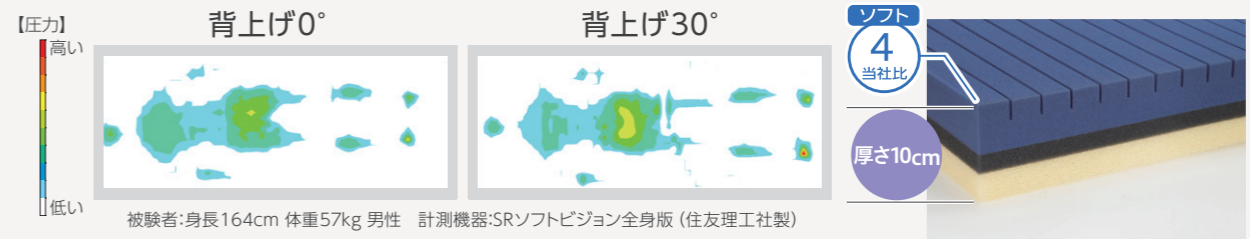

衛生面への配慮

- **通気タイプ、清拭タイプともに蒸れを防ぐ外カバー加工**
通気カバーには、スポーツ用品等に使用される超吸水速乾生地を採用。清拭カバーには、水分をはじいたままにせず、すぐに広がり乾きやすい特殊加工を施しています。汗などの水分を素早く吸水・発散するので蒸れを防ぎ、清拭後の水分も早く乾くので細菌が繁殖しにくく衛生的です。
- **中材は洗浄できる無膜ウレタン**
中材には、無膜ウレタンを採用。通水性が良く洗浄もでき、乾燥にかかる時間も短縮できます。

ベイシスサポート

1枚でショート・レギュラー・ロングの長さに対応

防水

抗菌



BS ベイシス サポート
PLATZ Basis Support

90cm幅

通気タイプ

レギュラー/ショート対応 **PM14-A9008**
 ■メーカー希望小売価格 **52,000円(税込57,200円)**
 ■TAISコード/00631-000594 ■JANコード/4539940061186

レギュラー/ショート/ロング対応 **PM14-A9008L**
 ■メーカー希望小売価格 **58,000円(税込63,800円)**
 ■TAISコード/00631-000596 ■JANコード/4539940061247

■寸法/ショートタイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
 レギュラータイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
 ロングタイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ205.0cm

■質量/ショートタイプ:5.5kg、レギュラータイプ:5.8kg、ロングタイプ:6.2kg

■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム

■原産国/ベトナム

※ロング専用オプション/90cm幅 PM16-90L 6,000円(税込6,600円)

83cm幅

レギュラー/ショート対応 **PM14-A8308**
 ■メーカー希望小売価格 **52,000円(税込57,200円)**
 ■TAISコード/00631-000595 ■JANコード/4539940061193

レギュラー/ショート/ロング対応 **PM14-A8308L**
 ■メーカー希望小売価格 **58,000円(税込63,800円)**
 ■TAISコード/00631-000597 ■JANコード/4539940061254

■寸法/ショートタイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
 レギュラータイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
 ロングタイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ205.0cm

■質量/ショートタイプ:5.1kg、レギュラータイプ:5.4kg、ロングタイプ:5.8kg

■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム

■原産国/ベトナム

※ロング専用オプション/83cm幅 PM16-83L 6,000円(税込6,600円)

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

90cm幅

清拭タイプ

レギュラー/ショート対応 **PM15-A9008**
 ■メーカー希望小売価格 **58,000円(税込63,800円)**
 ■TAISコード/00631-000598 ■JANコード/4539940061209

レギュラー/ショート/ロング対応 **PM15-A9008L**
 ■メーカー希望小売価格 **63,000円(税込69,300円)**
 ■TAISコード/00631-000600 ■JANコード/4539940061261

■寸法/ショートタイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
 レギュラータイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
 ロングタイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ205.0cm

■質量/ショートタイプ:5.7kg、レギュラータイプ:6.0kg、ロングタイプ:6.4kg

■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム

■原産国/ベトナム

※ロング専用オプション/90cm幅 PM16-90L 6,000円(税込6,600円)

83cm幅

レギュラー/ショート対応 **PM15-A8308**
 ■メーカー希望小売価格 **58,000円(税込63,800円)**
 ■TAISコード/00631-000599 ■JANコード/4539940061216

レギュラー/ショート/ロング対応 **PM15-A8308L**
 ■メーカー希望小売価格 **63,000円(税込69,300円)**
 ■TAISコード/00631-000601 ■JANコード/4539940061278

■寸法/ショートタイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
 レギュラータイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
 ロングタイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ205.0cm

■質量/ショートタイプ:5.3kg、レギュラータイプ:5.6kg、ロングタイプ:6.0kg

■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム



■原産国/ベトナム

※ロング専用オプション/83cm幅 PM16-83L 6,000円(税込6,600円)

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

体圧分散データ 計測機器:SRソフトビジョン全身版(住友理工社製)

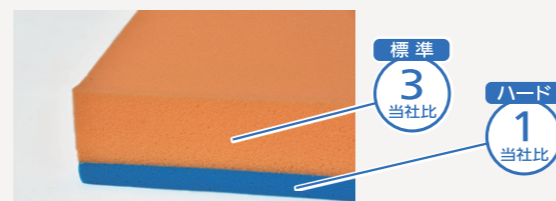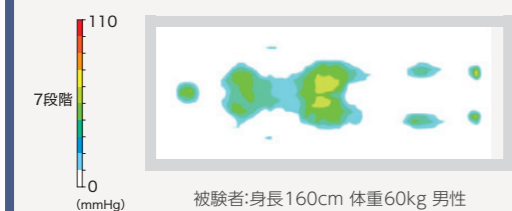

カタサポ

制菌性に優れたポリエステルマットレス。程よいかたさで、寝返りや立ち上がりをサポートします。



Katasapo

90cm幅

通気タイプ

レギュラータイプ **PM23-A9008**
 ■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**
 ■TAISコード/00631-000719 ■JANコード/4539940061773

ショートタイプ **PM23-A9008S**
 ■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**
 ■TAISコード/00631-000719 ■JANコード/4539940061780

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)

■質量/6.5kg(ショート6.2kg)

■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ポリエステル

■原産国/日本

83cm幅

レギュラータイプ **PM23-A8308**
 ■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**
 ■TAISコード/00631-000719 ■JANコード/4539940061797

ショートタイプ **PM23-A8308S**
 ■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**
 ■TAISコード/00631-000719 ■JANコード/4539940061803

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)

■質量/6.0kg(ショート5.7kg)

■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ポリエステル


■原産国/日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。 ※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

優れた制菌性

中材には、SEK 制菌加工(一般用途) 認証を得ている東洋紡のポリエステル中綿「エスメーロ®」を使用。繊維上の細菌の増殖を抑制し、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に制菌効果を示します。制菌機能が保持される洗濯耐久性※を持ち、マットレスの洗浄後も長く制菌効果が持続します。

※SEK制菌加工(一般用途) 認証の洗濯回数に準じています。

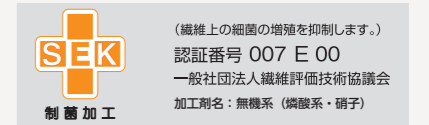

程よいかたさで動きやすい


柔らかすぎず程よい硬さで身体が沈み込み過ぎず、寝返りや立ち上がりをサポートします。幅方向にスリットを入れることで屈曲性を高め、ベッドのリクライニングにも追従します。



メンテナンス性

中材と外カバーは洗浄可能です。縮みなど形状変化が少ない高性能素材を使用し、繰り返し洗浄・乾燥・消毒にも高い耐久性があります。内カバー付きで、外カバーの着脱も簡単です。

反発力が高くへたりにくい機能性素材を採用し、かたさを保ちながら軽量化を実現。納品や保管作業等での取り扱いがしやすくなりました。

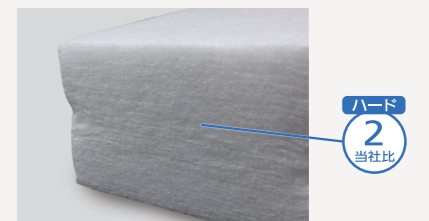

ユービーポイント エース

防水

寝心地の良さと動きやすさを両立した、幅広い方にお使いいただけるベーシックなウレタンフォームマットレス



UBpoint Ace

通気タイプ

■メーカー希望小売価格 **45,000円(税込49,500円)**

90cm幅	レギュラータイプ PM26-A9008 ■TAISコード/00631-000714 ■JANコード/4539940061889
	ショートタイプ PM26-A9008S ■TAISコード/00631-000714 ■JANコード/4539940061896

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.0kg(ショート5.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム

83cm幅	レギュラータイプ PM26-A8308 ■TAISコード/00631-000714 ■JANコード/4539940061902
	ショートタイプ PM26-A8308S ■TAISコード/00631-000714 ■JANコード/4539940061919

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.5kg(ショート5.0kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**

90cm幅	レギュラータイプ PM27-A9008 ■TAISコード/00631-000715 ■JANコード/4539940061926
	ショートタイプ PM27-A9008S ■TAISコード/00631-000715 ■JANコード/4539940061933

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.0kg(ショート5.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム


83cm幅	レギュラータイプ PM27-A8308 ■TAISコード/00631-000715 ■JANコード/4539940061940
	ショートタイプ PM27-A8308S ■TAISコード/00631-000715 ■JANコード/4539940061957

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.5kg(ショート5.0kg)
■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム


外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

硬さが選べるリバーシブルタイプ

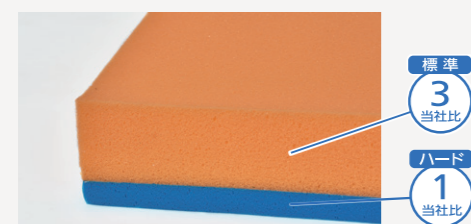


体圧分散データ 計測機器:SRソフトビジョン全身版 (住友理工社製)

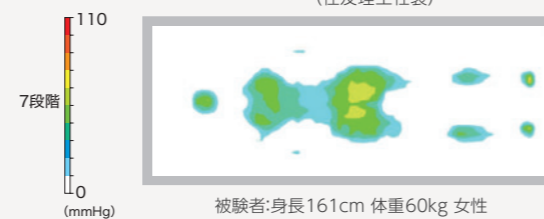

ユービーポイント ネクスト

防水

寝心地を選べるリバーシブルのウレタンフォームマットレス

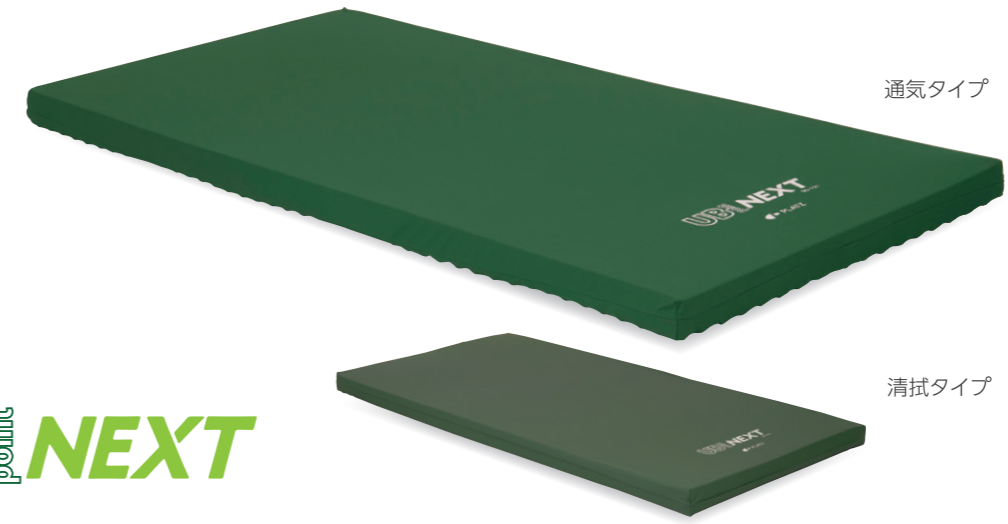

UBpoint NEXT

通気タイプ

■メーカー希望小売価格 **36,000円(税込39,600円)**

90cm幅	レギュラータイプ PM28-A9008 ■TAISコード/00631-000720 ■JANコード/4539940061971
	ショートタイプ PM28-A9008S ■TAISコード/00631-000720 ■JANコード/4539940061988

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/3.7kg(ショート3.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム


83cm幅	レギュラータイプ PM28-A8308 ■TAISコード/00631-000720 ■JANコード/4539940061995
	ショートタイプ PM28-A8308S ■TAISコード/00631-000720 ■JANコード/4539940062008

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/3.4kg(ショート3.2kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

寝心地を選べるリバーシブルタイプ

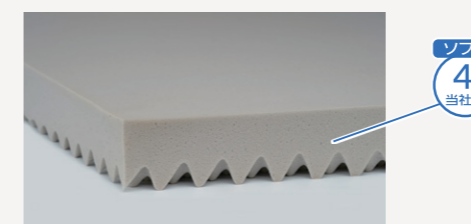

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 **41,000円(税込45,100円)**

90cm幅	レギュラータイプ PM29-A9008 ■TAISコード/00631-000721 ■JANコード/4539940062015
	ショートタイプ PM29-A9008S ■TAISコード/00631-000721 ■JANコード/4539940062022

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/4.0kg(ショート3.8kg)
■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム


83cm幅	レギュラータイプ PM29-A8308 ■TAISコード/00631-000721 ■JANコード/4539940062039
	ショートタイプ PM29-A8308S ■TAISコード/00631-000721 ■JANコード/4539940062046

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/3.7kg(ショート3.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。


体圧分散データ 計測機器:SRソフトビジョン全身版 (住友理工社製)

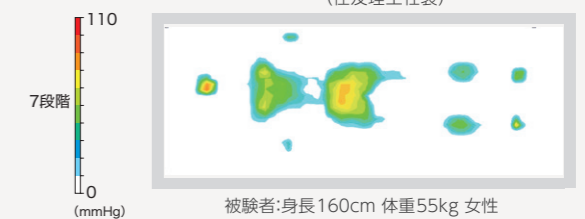

延長マットレス

ロングタイプのベッドをご使用の際に、マットレスの長さを延長します。

延長マットレス(清拭ウレタンタイプ)

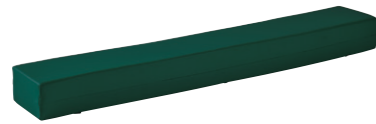

厚さ8cm 適合マットレスサイズ:厚さ8.0~9.0cm

■メーカー希望小売価格 **12,000円(税込13,200円)**

90cm幅 PM08-90B

- TAISコード/00631-000466
- JANコード/4539940061049
- 寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
- 質量/0.5kg
- 材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
- 原産国/ベトナム

83cm幅 PM08-83B

- TAISコード/00631-000568
- JANコード/4539940061025
- 寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
- 質量/0.5kg
- 材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
- 原産国/ベトナム



厚さ11cm 適合マットレスサイズ:厚さ10.0~12.0cm

■メーカー希望小売価格 **14,000円(税込15,400円)**

90cm幅 PM20-L9011

- TAISコード/00631-000709
- JANコード/4539940061865
- 寸法/幅90.0×厚さ11.0×長さ14.0cm
- 質量/0.5kg
- 材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
- 原産国/ベトナム

83cm幅 PM20-L8311


- TAISコード/00631-000709
- JANコード/4539940061872
- 寸法/幅83.0×厚さ11.0×長さ14.0cm
- 質量/0.5kg
- 材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
- 原産国/ベトナム

周辺機器

より良い介護環境のための
豊富なオプション類

周辺機器	
サイドレール	36
ハンドグリップ	37
ベッド用グリップ	38
昇降式ベッドサイドテーブル	42
オーバーテーブル	42
人感センサー付フットライト	42
床キズ防止カーペット	43
酸素ボンベホルダー	43
ミオレットⅢ専用スイッチ接続キット	43
運搬台車	43
スリムカゴ台車	43
よかレール	44


サイドレール

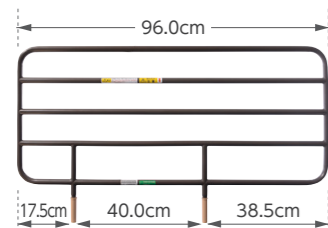

ロングサイドレール(2本組)

PA505-96
 ■メーカー希望小売価格
19,000円(税込20,900円)


■TAISコード/00631-000232
 ■JANコード/4539940082051
 ■質量/6.8kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

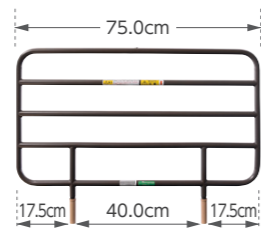

レギュラーサイドレール(2本組)

PA505-75
 ■メーカー希望小売価格
13,000円(税込14,300円)

■TAISコード/00631-000230
 ■JANコード/4539940082020
 ■質量/5.4kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム

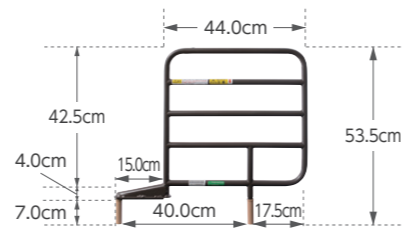

ショートサイドレール(2本組)

PA505-44
 ■メーカー希望小売価格
13,000円(税込14,300円)

■TAISコード/00631-000228
 ■JANコード/4539940081986
 ■質量/4.5kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂 ■原産国/ベトナム



ロングサイドレール(2本組)メッシュタイプ安全カバー付

PA505-96S
 ■メーカー希望小売価格
37,000円(税込40,700円)

■TAISコード/00631-000233
 ■JANコード/4539940082075
 ■質量/7.4kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
 ※安全カバーのみ(1枚入)
 PA505S-96 9,000円(税込9,900円)



レギュラーサイドレール(2本組)メッシュタイプ安全カバー付

PA505-75S
 ■メーカー希望小売価格
31,000円(税込34,100円)

■TAISコード/00631-000231
 ■JANコード/4539940082044
 ■質量/5.9kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
 ※安全カバーのみ(1枚入)
 PA505S-75 9,000円(税込9,900円)



ショートサイドレール(2本組)メッシュタイプ安全カバー付

PA505-44S
 ■メーカー希望小売価格
31,000円(税込34,100円)

■TAISコード/00631-000229
 ■JANコード/4539940082013
 ■質量/4.8kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
 ※安全カバーのみ(1枚入)
 PA505S-44 9,000円(税込9,900円)



ロングサイドレール(2本組)クッションタイプ安全カバー付

PA505-96SW
 ■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■TAISコード/00631-000615
 ■JANコード/4539940084369
 ■質量/8.8kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
 ※安全カバーのみ(1枚入)
 PA505SW-96 オープン価格





レギュラーサイドレール(2本組)クッションタイプ安全カバー付

PA505-75SW
 ■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■TAISコード/00631-000614
 ■JANコード/4539940084352
 ■質量/7.0kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
 ※安全カバーのみ(1枚入)
 PA505SW-75 オープン価格

ロングタイプのベッドをご使用される場合には、下記のオプションが必要です。スパーサーは必ずボード側に取り付けてください。

サイドレールの長さを+7cm延長するスパーサーがセットになったサイドレールです。

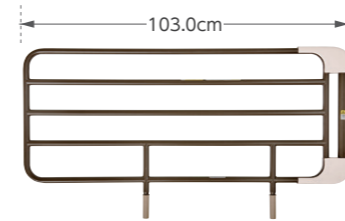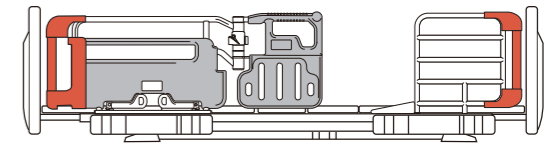


ロングサイドレール(2本組)ロングタイプ対応スパーサー付

PA505-96L
 ■メーカー希望小売価格
25,000円(税込27,500円)

■TAISコード/00631-000444
 ■JANコード/4539940082884
 ■材質/サイドレール:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 スパーサー:PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム


※スパーサーのみ(1個入) PS02-PA505 3,000円(税込3,300円)

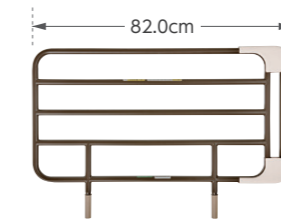

レギュラーサイドレール(2本組)ロングタイプ対応スパーサー付

PA505-75L
 ■メーカー希望小売価格
19,000円(税込20,900円)

■TAISコード/00631-000445
 ■JANコード/4539940082891
 ■材質/サイドレール:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 スパーサー:PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム

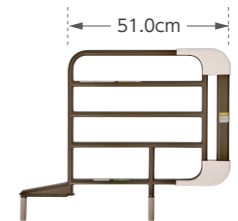


ショートサイドレール(2本組)ロングタイプ対応スパーサー付

PA505-44L
 ■メーカー希望小売価格
19,000円(税込20,900円)


■TAISコード/00631-000446
 ■JANコード/4539940082907
 ■材質/サイドレール:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 スパーサー:PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム

組み合わせ例

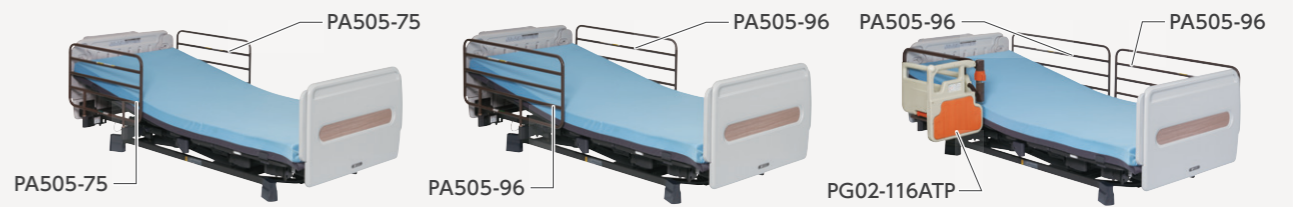

※非課税のベッドと同時に購入の場合、サイドレールは2セット(4本)まで非課税となります。


ハンドグリップ

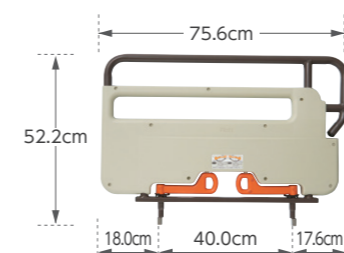

ハンドグリップ

PG04-75
 ■メーカー希望小売価格
33,000円(税込36,300円)

■TAISコード/00631-000545
 ■JANコード/4539940083492
 ■質量/5.1kg ■材質/スチール、ABS樹脂 ■原産国/ベトナム

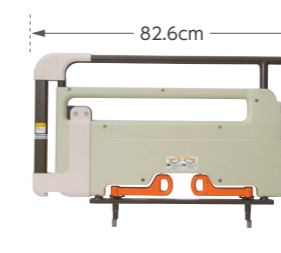

ハンドグリップ ロングタイプ対応スパーサー付

PG04-75L
 ■メーカー希望小売価格
36,000円(税込39,600円)

■TAISコード/00631-000547
 ■JANコード/4539940083515
 ■質量/5.5kg ■材質/スチール、ABS樹脂、PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム


※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 13,000円(税込14,300円) ※スパーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 3,000円(税込3,300円)

ニーパロ+(プラス) ニーパロL(エル)

抱え上げない介護・看護を実現
安心・安全な移乗と
腰痛予防をサポートします



膝折れを防ぎ、
安全な立ち上がり・移乗を実現する「ニーパロひざパッド」

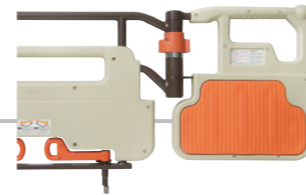

従来のベッド用グリップでは・・・

写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



ニーパロひざパッドがあると・・・



端座位時のずり落ちを防止

楽な立ち上がり

立位を安定させます

車いすからのずり落ちを防止

ベッド用グリップ「ニーパロ」の使い方

後方介助移乗

●【使い方(A)】ベッドから車いすへの介助移乗(トランスファーボードを使った場合)

抱え上げない移乗を実現



1 ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすと水平かやや高く設定し、グリップ部を45度にセットします。車いすのブレーキをかけ、車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。

2 グリップ部を握り、後ろに倒れないように注意しながら、ボードを左臀部の下に敷き、ボードの端を車いすの中心位置に置きます。

3 車いすの手すりを握り、引くように促します。介助者の右足はベッドの上に乗せます。



4 左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させます。移乗中に車いすが動かないように左足で固定します。




5 右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車いすの奥まで移乗させます。



6 ボードを抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ、前後に動かしながら引き抜きます。

自立移乗

●【使い方(B)】ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)

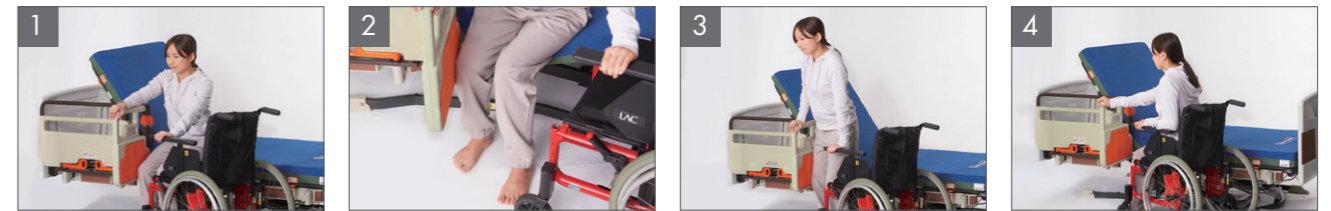

1 グリップ部を90度を開き、膝をパッドにあてます。ベッドの高さは車いすよりやや高くします。車いすを寄せ、ブレーキをかけます。

2 車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。(45度の場合も同じ)

3 膝をパッドにあてながら立ち上がり、車いすへ移ります。あるいは腰を浮かして・・・

4

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

ポイント

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整する」ことです。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面と水平かやや高くします。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすの座面と水平かやや低く設定します。







自動ロック式ベッド用グリップ ニーパーロ+ (プラス)

ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式(業界初)

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、「ニーパーロ+」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。(特許第4921535号)

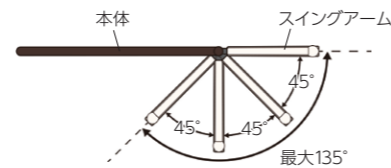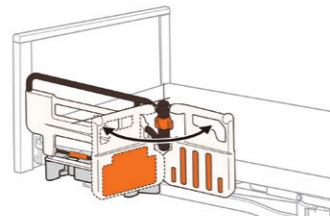

握力の弱った方でも簡単にロック操作できるユニバーサルデザインの解除ハンドル


握力が弱った方やマヒがある方でも指や手のひらで楽に解除できる形状です。

従来品から形状を改良し、よりスムーズな操作ができるようになりました。



指や手のひらで楽に解除できるユニバーサルデザインです。

仕様

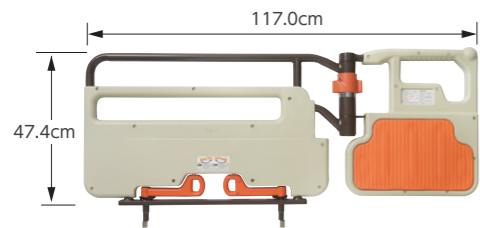

ニーパーロ+ ニーパーロひざパッド付

PG02-116ATP

■メーカー希望小売価格 **69,000円(税込75,900円)**

- TAISコード/00631-000532 ■JANコード/4539940083430
- 寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/9.2kg
- 材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
- 原産国/ベトナム

ニーパーロ+

PG02-116AT

■メーカー希望小売価格 **64,000円(税込70,400円)**

- TAISコード/00631-000531 ■JANコード/4539940083409
- 寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/8.9kg
- 材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂
- 原産国/ベトナム

ニーパーロ+ ニーパーロひざパッド付 ロングタイプ対応スペーサー付

PG02-116ATPL

■メーカー希望小売価格 **72,000円(税込79,200円)**

- TAISコード/00631-000530 ■JANコード/4539940083454
- 寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/9.6kg
- 材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
- 原産国/ベトナム

ニーパーロ+ ロングタイプ対応スペーサー付

PG02-116ATL

■メーカー希望小売価格 **67,000円(税込73,700円)**

- TAISコード/00631-000529 ■JANコード/4539940083447
- 寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/9.3kg
- 材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
- 原産国/ベトナム

※ニーパーロ ひざパッドのみ PF500P-116 5,000円(税込5,500円) ※ロングタイプ対応スペーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 3,000円(税込3,300円)
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 13,000円(税込14,300円) ※通常仕様とロングタイプ対応スペーサー付の両方にご使用できます。



レバーロック式ベッド用グリップ ニーパーロL(エル)

簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロックの操作が必要です。スイングアームは22.5度毎に固定できます。




ベッドへの簡単取り付け

サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。工具などを使わず簡単に取り付けすることができます(ニーパーロ+も同様です)。



仕様

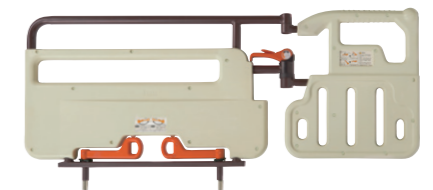

ニーパーロL ニーパーロひざパッド付

PG03-116MP

■メーカー希望小売価格 **65,000円(税込71,500円)**

- TAISコード/00631-000536 ■JANコード/4539940083461
- 寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/8.0kg
- 材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
- 原産国/ベトナム

ニーパーロL

PG03-116M

■メーカー希望小売価格 **60,000円(税込66,000円)**

- TAISコード/00631-000535 ■JANコード/4539940083416
- 寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/7.7kg
- 材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂
- 原産国/ベトナム

ニーパーロL ニーパーロひざパッド付 ロングタイプ対応スペーサー付

PG03-116MPL

■メーカー希望小売価格 **68,000円(税込74,800円)**

- TAISコード/00631-000534 ■JANコード/4539940083485
- 寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/8.4kg
- 材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
- 原産国/ベトナム

ニーパーロL ロングタイプ対応スペーサー付

PG03-116ML

■メーカー希望小売価格 **63,000円(税込69,300円)**

- TAISコード/00631-000533 ■JANコード/4539940083478
- 寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/8.1kg
- 材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
- 原産国/ベトナム

※ニーパーロ ひざパッドのみ PF500P-116 5,000円(税込5,500円) ※ロングタイプ対応スペーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 3,000円(税込3,300円)
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 13,000円(税込14,300円) ※通常仕様とロングタイプ対応スペーサー付の両方にご使用できます。

昇降式ベッドサイドテーブル



- | | | |
|---|---|---|
| <p>PT03-840MB
■メーカー希望小売価格
60,000円(税込66,000円)
■TAISコード/00631-000618
■JANコード/4539940084581</p> | <p>PT03-840LB
■メーカー希望小売価格
60,000円(税込66,000円)
■TAISコード/00631-000619
■JANコード/4539940084598</p> | <p>PT03-840WH
■メーカー希望小売価格
55,000円(税込60,500円)
■TAISコード/00631-000620
■JANコード/4539940084604</p> |
|---|---|---|

■寸法/幅84.0×奥行43.0×高さ60.0~84.0cm 天板:幅84.0×奥行40.0×厚さ1.8cm
■質量/14.4kg ■材質/ベースフレーム:支柱:スチール、樹脂 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) キャスターカバー:PP樹脂
■最大使用荷重/30kg ■原産国/ベトナム

- ベッド等との挟み込みによる事故を防ぐ、安全機構を搭載しています。
- 耐荷重は従来品の10kgから30kgに増加し、堅牢性が向上しました。
- 天板のぐらつきを抑え、安定した使い心地です。

オーバーテーブル



- PT01-A1
■メーカー希望小売価格 **17,000円(税込18,700円)**
■TAISコード/00631-000590 ■JANコード/4539940084017
■寸法/94.5~100.0×40.5×8.0cm ■質量/4.5kg
■材質/甲板:PE樹脂 スライド部・フック:ABS樹脂 ■最大使用荷重/15.0kg
■原産国/ベトナム
- 全幅の調節が可能で、1枚で90cm幅/83cm幅のプラッツ社製ベッドに使用可能です。
 - 設置する高さをサイドレールのパイプの高さに合わせて調整できます。
 - 天板の面積が広く、トレーがゆったり置けます。
 - ご利用者の腕が置きやすい形状で、食事の際の姿勢保持をサポートします。
 - ベッドのフットボードに掛けて収納できます。

人感センサー付フットライト



- ヨカロ・ミオレットⅢ用 PL02-5VL
ミオレットⅢネクスト用 PL04-5VL
■メーカー希望小売価格 オープン価格
- 寸法/幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm
■材質/PC樹脂
■原産国/中国
- ベッドにおける起居動作や、介護の際の動線の把握など、夜間の居室における事故を予防します。
 - 即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライトを採用。
 - 点灯時間は1分/3分/5分/10分の4段階、明るさは3段階に切り替え可能です。
 - 電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコンセントは必要ありません。

床キズ防止カーペット(4枚組)



- PSC-1216SC
■メーカー希望小売価格 **4,000円(税込4,400円)**
■寸法/16.5×12.5cm×厚さ5mm
■材質/ナイロン
■原産国/日本

酸素ボンベホルダー



- PE02-S1
■メーカー希望小売価格 オープン価格
■寸法/幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm
■質量/2.2kg
■材質/スチール
■原産国/日本
※木製フラットボードおよび木製宮付ボードにはご使用できません。

ミオレットⅢ専用 スイッチ接続キット



- PE07-S1
■メーカー希望小売価格 オープン価格
■寸法/幅11.0×高さ7.0×奥行5.0cm
■材質/ABS樹脂
■原産国/日本
■対応する接続方法/φ3.5mmモノラルプラグによる接続


- 環境制御装置の取り付けが可能になり、手元スイッチの操作が困難な方でもベッドの昇降やリクライニングができるようになります。
 - 環境制御装置を取り付ける際のベッドの改造が不要になります。改造の手間や費用、また、改造によるベッドの不具合・故障のリスクを減らします。
- ※ミオレットⅢネクストにはご使用できません。
※意思伝達装置、環境制御装置は別売りです。当社でのお取り扱いはございませんので、販売店様へお問い合わせください。

運搬台車



- LG-100
■メーカー希望小売価格 **54,000円(税込59,400円)**
■寸法/幅65.0×奥行44.0cm×高さ85.5cm
■材質/フレーム:スチール、車輪:ゴム
■耐荷重/160kg
■原産国/ベトナム

スリムカゴ台車

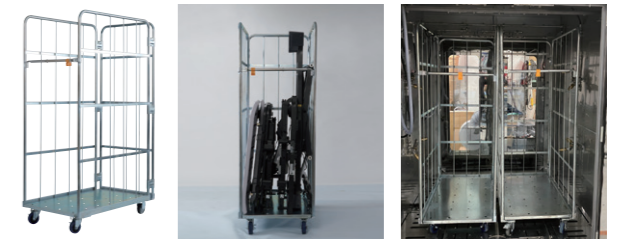

- LG-200A
■メーカー希望小売価格 **90,000円(税込99,000円)**
■寸法/幅63.0×奥行104.0cm×高さ173.5cm
■材質/フレーム:スチール、車輪:ゴム
■耐荷重/200kg
■原産国/中国

よかレール


据え置き型手すり
よかレール

取り付け工事が不要な、置くだけで
起き上がりや立ち上がりをしっかり
サポートする据え置き型手すりです。



5段階の高さ調整で、幅広い使い方に対応

手すりの高さは70~86cm。横手すりを4本配置し、4cm刻み(70/74/78/82/86cm)の5段階で高さ調整ができるので、幅広い体格の方の様々な使い方に対応できます。

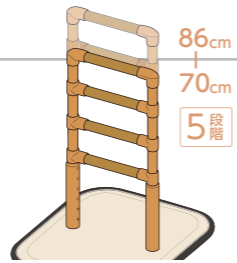


握りやすい手すり

スチール芯材に樹脂をコーティングした、公共施設などでも採用されている材質で、強度と握り心地を両立させています。握りやすく力が入りやすい太さの直径3.2cmです。



安全性にも配慮

夜間でも手すりの場所がわかりやすい蓄光リング付き。寝ている時に眩しすぎないように、取付位置に配慮しています。手すり部分の固定は貫通式のピンを2本使用し、揺れを軽減しています。

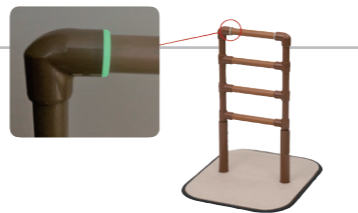

つまずきにくく、しっかり安定

ベースの厚みは薄型の13mm。縁のゴムをスロープ状に取り付け、つまずきにくさに配慮しています。マット裏面は吸着面になっていて取り外して洗濯できるため、衛生的にご使用できます。




手すり同士を連結することで、より広い動線をサポート

手すりは3台まで連結できます。ベッドから出入り口、廊下から居室など、より広い動線を切れ間なくサポートします。



よかレール センタータイプ

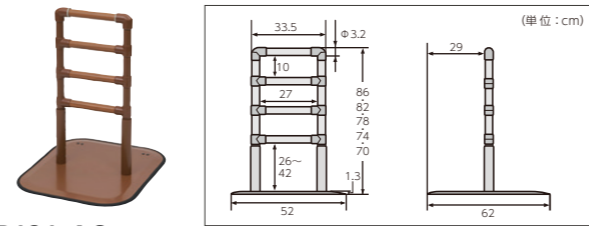


PJ01-AS

■メーカー希望小売価格 **45,000円(税込49,500円)**
■TAISコード/00631-000722 ■JANコード/4539940180054

■材質/手すり:スチール、樹脂 支柱:スチール ベース:スチール、樹脂、合成ゴム
■質量/13.0kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/インドネシア

よかレール サイドタイプ

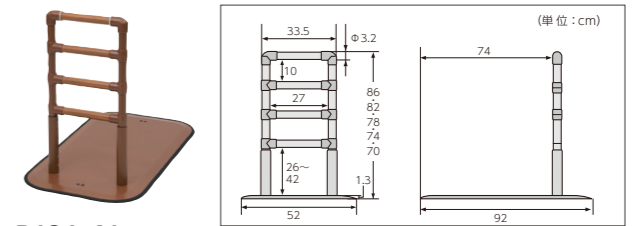


PJ01-AL

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**
■TAISコード/00631-000723 ■JANコード/4539940180078


■材質/手すり:スチール、樹脂 支柱:スチール ベース:スチール、樹脂、合成ゴム
■質量/17.0kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/インドネシア

よかレール ロングタイプ

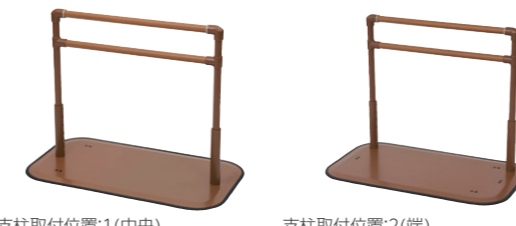

支柱取付位置:1(中央)

支柱取付位置:2(端)

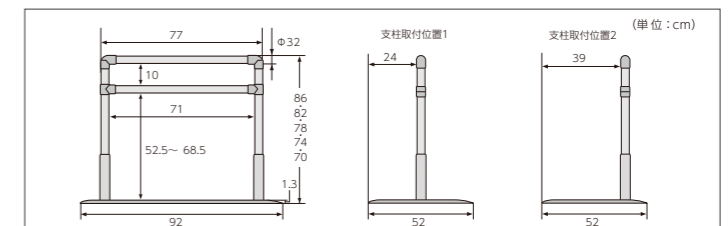


PJ01-BL

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**
■TAISコード/00631-000724 ■JANコード/4539940180092

■材質/手すり:スチール、樹脂 支柱:スチール ベース:スチール、樹脂、合成ゴム ■質量/17.5kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/インドネシア

よかレール コーナータイプ

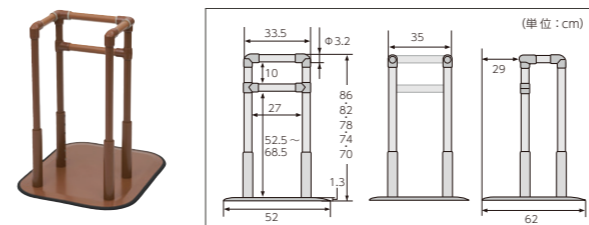


PJ01-CS

■メーカー希望小売価格 **60,000円(税込66,000円)**
■TAISコード/00631-000725 ■JANコード/4539940180115

■材質/手すり:スチール、樹脂 支柱:スチール ベース:スチール、樹脂、合成ゴム
■質量/13.5kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/インドネシア

よかレール マット

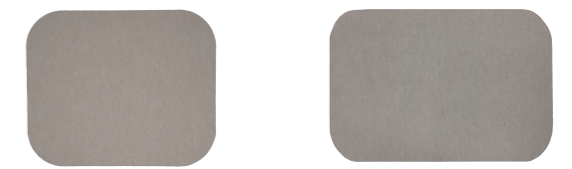

センタータイプ・コーナータイプ用

PJ01M-S1-BE

■メーカー希望小売価格 **2,500円(税込2,750円)**
■JANコード/4539940180252


■材質/表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
■原産国/日本

サイドタイプ・ロングタイプ用

PJ01M-L1-BE

■メーカー希望小売価格 **3,500円(税込3,850円)**
■JANコード/4539940180269

よかレール ストッパー

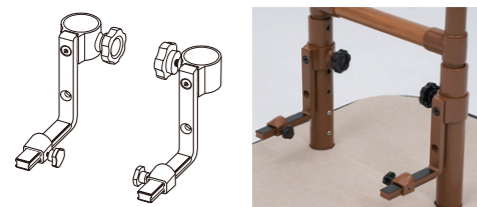

取り付け例

PJ01-T1

■メーカー希望小売価格 **9,000円(税込9,900円)**
 ■TAISコード/00631-000758 ■JANコード/4539940180139
 ■材質/アルミ合金、ゴム、鉄、樹脂 ■質量/0.7kg ■原産国/ベトナム

よかレール よかオモシ



取り付け例

PJ01W-5Z

■メーカー希望小売価格 **11,000円(税込12,100円)**
 ■TAISコード/00631-000764 ■JANコード/4539940180412
 ■材質/おもし鉄 底面:合成ゴム ■質量/5.0kg ■原産国/ベトナム


よかレール 連結バー



レギュラータイプ PJ01E-R1

■メーカー希望小売価格 **27,000円(税込29,700円)**
 ■TAISコード/00631-000798 ■JANコード/4539940180429

■材質/アルミ合金、樹脂、合成ゴム
 ■質量/2.0kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/ベトナム

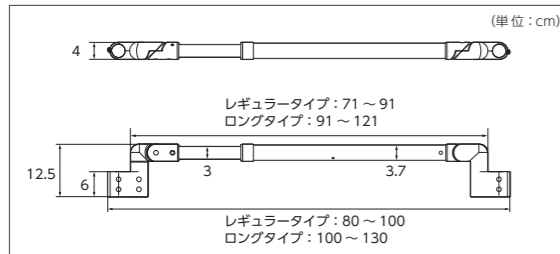

ロングタイプ PJ01E-L1

■メーカー希望小売価格 **30,000円(税込33,000円)**
 ■TAISコード/00631-000799 ■JANコード/4539940180436

■材質/アルミ合金、樹脂、合成ゴム
 ■質量/2.4kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/ベトナム

- 手すり同士をつなぐことで、動線を切れ間なくサポートします。
- 設置する場所に合わせて、長さや上下・左右の角度を調整できます。
- 連結できる手すりは3台までです。



取り付け例

組み合わせコード一覧

介護保険の請求の際に使用するコード一覧です。
 ご注文の際は、P45~46の製品型式をご使用ください。
 組み合わせの型式ではご注文を承ることができませんので、ご注意ください。

■よかレール センタータイプ

		手すりのみ	手すり +ストッパー	手すり +おもし	手すり +連結バー (レギュラータイプ)	手すり +連結バー (レギュラータイプ) +おもし	手すり +連結バー (ロングタイプ)	手すり +連結バー (ロングタイプ) +おもし
マットなし	型式	PJ01-AS	PJ01-AS-T	PJ01-AS-5Z	PJ01-AS-R1	PJ01-AS-5Z-R1	PJ01-AS-L1	PJ01-AS-5Z-L1
	TAISコード	00631-000722	00631-000731	00631-000765	00631-000800	00631-000804	00631-000801	00631-000805
マット付き	型式	PJ01-ASM1	PJ01-ASM1-T	PJ01-ASM1-5Z	PJ01-ASM1-R1	PJ01-ASM1-5Z-R1	PJ01-ASM1-L1	PJ01-ASM1-5Z-L1
	TAISコード	00631-000726	00631-000735	00631-000766	00631-000802	00631-000806	00631-000803	00631-000807

■よかレール サイドタイプ

		手すりのみ	手すり +ストッパー	手すり +おもし	手すり +連結バー (レギュラータイプ)	手すり +連結バー (レギュラータイプ) +おもし	手すり +連結バー (ロングタイプ)	手すり +連結バー (ロングタイプ) +おもし
マットなし	型式	PJ01-AL	PJ01-AL-T	PJ01-AL-5Z	PJ01-AL-R1	PJ01-AL-5Z-R1	PJ01-AL-L1	PJ01-AL-5Z-L1
	TAISコード	00631-000723	00631-000732	00631-000767	00631-000808	00631-000812	00631-000809	00631-000813
マット付き	型式	PJ01-ALM1	PJ01-ALM1-T	PJ01-ALM1-5Z	PJ01-ALM1-R1	PJ01-ALM1-5Z-R1	PJ01-ALM1-L1	PJ01-ALM1-5Z-L1
	TAISコード	00631-000727	00631-000736	00631-000768	00631-000810	00631-000814	00631-000811	00631-000815

■よかレール ロングタイプ

		手すりのみ	手すり+ストッパー	手すり+おもし	手すり +連結バー (レギュラータイプ)	手すり +連結バー (レギュラータイプ) +おもし	手すり +連結バー (ロングタイプ)	手すり +連結バー (ロングタイプ) +おもし
マットなし	型式	PJ01-BL	PJ01-BL-T	PJ01-BL-5Z	PJ01-BL-R1	PJ01-BL-5Z-R1	PJ01-BL-L1	PJ01-BL-5Z-L1
	TAISコード	00631-000724	00631-000733	00631-000769	00631-000816	00631-000820	00631-000817	00631-000821
マット付き	型式	PJ01-BLM1	PJ01-BLM1-T	PJ01-BLM1-5Z	PJ01-BLM1-R1	PJ01-BLM1-5Z-R1	PJ01-BLM1-L1	PJ01-BLM1-5Z-L1
	TAISコード	00631-000728	00631-000737	00631-000770	00631-000818	00631-000822	00631-000819	00631-000823

■よかレール コーナータイプ

		手すりのみ	手すり +ストッパー	手すり +おもし	手すり +連結バー (レギュラータイプ)	手すり +連結バー (レギュラータイプ) +おもし	手すり +連結バー (ロングタイプ)	手すり +連結バー (ロングタイプ) +おもし
マットなし	型式	PJ01-CS	PJ01-CS-T	PJ01-CS-5Z	PJ01-CS-R1	PJ01-CS-5Z-R1	PJ01-CS-L1	PJ01-CS-5Z-L1
	TAISコード	00631-000725	00631-000734	00631-000771	00631-000824	00631-000828	00631-000825	00631-000829
マット付き	型式	PJ01-CSM1	PJ01-CSM1-T	PJ01-CSM1-5Z	PJ01-CSM1-R1	PJ01-CSM1-5Z-R1	PJ01-CSM1-L1	PJ01-CSM1-5Z-L1
	TAISコード	00631-000730	00631-000739	00631-000772	00631-000826	00631-000830	00631-000827	00631-000831

ベッドオプション適合表

No.	頁	製品名	型式	ヨカロ						ミオレットⅢネクスト						ミオレットⅢ					
				90cm幅			83cm幅			90cm幅			83cm幅			90cm幅			83cm幅		
				レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング
P2			P2			P12						P20									
マットレス、マットレスカバー、ベッドパッド																					
1	P26	ゼロンA(90cm幅・レギュラータイプ)	PM18-A9012・PM19-A9012	●		●※1				●		●※1				●		●※1			
2	P26	ゼロンA(90cm幅・ショートタイプ)	PM18-A9012S・PM19-A9012S		●					●						●					
3	P26	ゼロンA(83cm幅・レギュラータイプ)	PM18-A8312・PM19-A8312			●		●※2				●		●※2				●	●※2		
4	P26	ゼロンA(83cm幅・ショートタイプ)	PM18-A8312S・PM19-A8312S				●					●						●			
5	P28	ゼロンA アコーネ(90cm幅・レギュラータイプ)	PM21-A9010・PM22-A9010	●		●※1				●		●※1				●		●※1			
6	P28	ゼロンA アコーネ(90cm幅・ショートタイプ)	PM21-A9010S・PM22-9010S		●					●						●					
7	P28	ゼロンA アコーネ(83cm幅・レギュラータイプ)	PM21-A8310・PM22-A8310			●		●※2				●		●※2				●	●※2		
8	P28	ゼロンA アコーネ(83cm幅・ショートタイプ)	PM21-A8310S・PM22-8310S				●					●						●			
9	P30	ベイスサポート(90cm幅・レギュラー/ショート対応)	PM14-A9008・PM15-A9008	●	●	●※3				●	●	●※3				●	●	●※3			
10	P30	ベイスサポート(90cm幅・レギュラー/ショート/ロング対応)	PM14-A9008L・PM15-A9008L	●	●	●				●	●	●				●	●	●			
11	P30	ベイスサポート(83cm幅・レギュラー/ショート対応)	PM14-A8308・PM15-A8308			●	●	●※4				●	●	●※4				●	●		
12	P30	ベイスサポート(83cm幅・レギュラー/ショート/ロング対応)	PM14-A8308L・PM15-A8308L			●	●	●				●	●	●				●	●		
13	P31	カタサポ(90cm幅・レギュラータイプ)	PM23-A9008	●		●※3				●		●※3				●		●※3			
14	P31	カタサポ(90cm幅・ショートタイプ)	PM23-A9008S		●					●						●					
15	P31	カタサポ(83cm幅・レギュラータイプ)	PM23-A8308			●		●※4				●		●※4				●	●※4		
16	P31	カタサポ(83cm幅・ショートタイプ)	PM23-A8308S				●					●						●			
17	P32	ユービーポイント エース(90cm幅・レギュラータイプ)	PM26-A9008・PM27-A9008	●		●※3				●		●※3				●		●※3			
18	P32	ユービーポイント エース(90cm幅・ショートタイプ)	PM26-A9008S・PM27-A9008S		●					●						●					
19	P32	ユービーポイント エース(83cm幅・レギュラータイプ)	PM26-A8308・PM27-A8308			●		●※4				●		●※4				●	●※4		
20	P32	ユービーポイント エース(83cm幅・ショートタイプ)	PM26-A8308S・PM27-A8308S				●					●						●			
21	P33	ユービーポイント ネクスト(90cm幅・レギュラータイプ)	PM28-A9008・PM29-A9008	●		●※3				●		●※3				●		●※3			
22	P33	ユービーポイント ネクスト(90cm幅・ショートタイプ)	PM28-A9008S・PM29-A9008S		●					●						●					
23	P33	ユービーポイント ネクスト(83cm幅・レギュラータイプ)	PM28-A8308・PM29-A8308			●		●※4				●		●※4				●	●※4		
24	P33	ユービーポイント ネクスト(83cm幅・ショートタイプ)	PM28-A8308S・PM29-A8308S				●					●						●			
25	P34	延長マットレス(90cm幅・厚さ8cm)	PM08-90B			●※5						●※5						●※5			
26	P34	延長マットレス(90cm幅・厚さ11cm)	PM20-L9011			●※5						●※5						●※5			
27	P34	延長マットレス(83cm幅・厚さ8cm)	PM08-83B					●※5						●※5					●※5		
28	P34	延長マットレス(83cm幅・厚さ11cm)	PM20-L8311					●※5						●※5					●※5		
サイドレール、ベッド用グリップ																					
29	P36	ロングサイドレール	PA505-96	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●		
30	P36	レギュラーサイドレール	PA505-75	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●		
31	P36	ショートサイドレール	PA505-44	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●		
32	P37	ロングサイドレール ロングタイプ対応スパーサー付	PA505-96L			●		●				●		●				●	●		
33	P37	レギュラーサイドレール ロングタイプ対応スパーサー付	PA505-75L			●		●				●		●				●	●		
34	P37	ショートサイドレール ロングタイプ対応スパーサー付	PA505-44L			●		●				●		●				●	●		
34	P37	ハンドグリップ	PG04-75	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●		
35	P37	ハンドグリップ ロングタイプ対応スパーサー付	PG04-75L			●		●				●		●				●	●		
36	P40-41	ニーパロ+・L	PG02-116AT(P)・PG03-116M(P)	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●		
37	P40-41	ニーパロ+・L ロングタイプ対応スパーサー付	PG02-116AT(P)L・PG03-116M(P)L			●		●				●		●				●	●		
ハイトスパーサー、キャスター																					
38	P19-24	キャスター(4個組)	PC03-8CK	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		
39	P19-24	ハイトスパーサー(4個組)	PH05-45							●	●	●	●	●		●	●	●	●		
テーブル																					
40	P42	オーバーテーブル	PT01-A1	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●		
41	P42	昇降式ベッドサイドテーブル	PT-03-840MB・LB・WH	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●		
その他																					
42	P42	人感センサー付フットライト	PL02-5VL	●	●	●	●	●								●	●	●	●		
43	P42	人感センサー付フットライト	PL04-5VL							●	●	●	●	●							
44	P43	スイッチ接続キット(ミオレットⅢ用)	PE07-S1													●	●	●	●		

※1 「延長マットレス PM20-L9011」とあわせてご使用ください。

※2 「延長マットレス PM20-L8311」とあわせてご使用ください。

※5 レギュラータイプのマットレスとあわせてご使用ください。

※3 「延長マットレス PM08-90B」とあわせてご使用ください。

※4 「延長マットレス PM08-83B」とあわせてご使用ください。



安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、使用上の安全を考慮した多少の誤差が含まれます。また表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格です。
- 製品の価格に「非課税」の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品（組立設置料）・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故（例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ）
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元



医療・介護ベッドメーカー
株式会社プラッツ



挑戦します！
お客様の笑顔のために。

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3434/FAX:092-584-3436

■北海道支店

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102
TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

■東北支店

〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
TRCセンタービル7F
TEL.03-5763-5425 FAX.03-5763-5426

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-402
TEL.052-737-2230 FAX.052-737-2231

■関西支店・関西ショールーム

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12
TEL.072-943-2723 FAX.072-943-2724

■中四国支店

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<https://www.platz-ltd.co.jp/>



■ご意見・ご質問等は

pinfo@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは